

4-komorový lymfodrenážny prístroj
Fabulo AirGo 4



Používateľská príručka

Pred použitím si návod na použitie pozorne prečítajte a dobre ho uchovajte pre ďalšie použitie.

I Obsah

Bezpečnostné opatrenia	1
Často kladené otázky	2
Technické parametre	4
Riešenie problémov	5
Popis produktu	6
Návod na obsluhu	7
Poznámky po použití	9
Čistenie	10
Skladovanie a údržba	10
Likvidácia	10
Obsah balenia	10

I Bezpečnostné Opatrenia

Pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie dobijacieho systému na obnovenie kompresie vzduchu

■ Upozornenia

- Žiadne úpravy tohto zariadenia nie sú povolené.
- Ak počas používania pociťujete silnú bolesť, akékoľvek nezvyčajné príznaky alebo si chcete v prípade núdze stiahnuť rukávy:
 - Stlačením tlačidla napájania zastavíte zariadenie alebo odpojte hadice;
 - Odstráňte rukávy a poraďte sa so svojim lekárom.
 - Pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojim lekárom, ak máte niektorý z nasledujúcich stavov:
 - Prebiehajúci zápal, infekciu, bolesti neznámeho pôvodu v mieste aplikácie alebo v jeho blízkosti;
 - Máte zlomeniny alebo dislokácie kostí v mieste aplikácie alebo v jeho blízkosti
 - Prijímate lekárske ošetrovanie alebo máte kontraindikáciu vyžadujúcu použitie akékoľvek lekárskej radiacej jednotky.
 - Používanie kardiostimulátora alebo iných zdravotníckych zariadení, ktoré sú náchylné na elektrické rušenie;
 - Bolesti pri malígnych nádoroch;
 - Bolesti pri chorobách srdca;
 - Bolesti pri osteoporóze

- 1 -

- Závažná dysfunkcia periférnej neuropatie alebo zmyslové poruchy spôsobené cukrovkou;
 - Nevhodnosť na masáž z dôvodu úrazu na tele;
- Uchovávať mimo dosahu dočiat, detí a ľudí ktorí ho nedokážu samostatne používať.
 - Nepoužívajte iný napájací adaptér ako originálny.
 - Napájací kábel napájacieho adaptéra nepoškrabte, nepoškodzujte, nadmeme neohýbajte, nefahajte ani neskrúcajte. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
 - Nie je dovolené používať, keď napájací adaptér nefunguje správne alebo je uvoľnená zástrčka.
 - Neprípájajte ani neodpájajte napájací adaptér mokrymi rukami.
 - Nedávajte ovládač do prikrývky ani nepoužívajte prístroj pri vysokej teplote.
 - Bez povolenia je zakázané prístroj prerábať, rozoberať alebo opravovať.


I Výstrahy

- Používajte iba napájací zdroj dodaný so systémom. Použitie iného zdroja napájania môže spôsobiť nesprávne fungovanie systému.
- Nepoužívajte ho v kúpeľni alebo na iných vlhkých miestach.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Keď napájací adaptér nepoužívate, odpojte ho.
- Neprechádzajte sa, keď používate túto jednotku alebo nosíte rukávy.
- Nenechávajte systém, napájací zdroj ani žiadne príslušenstvo na mieste, kde by ich mohli poškodiť deti, domáce zvieratá, škodcovia alebo tekutiny.
- Pridať zariadenia sú navrhnuté tak, aby ich mohla súčasne používať iba jedna osoba.

I Často kladené otázky

- Ot.1: Ako tento produkt funguje?
Odp.1: Jedná sa o zariadenie na kompresiu vzduchu, 4 vzduchové komory (chodidlo, lýtko, horná časť lýtky a stehno) nafukované a vyfukované so sofistikovanou sekvenciou na stimuláciu masovania a hľadania rúk, maximalizuje prietok krvi v celom tele, čím pomáha pri zníženej bolesti svalov a/alebo bolesti ošetrovaných oblastí a zlepšujú krvný obeh.
- Ot.2: Koľko je masážnych režimov a aký je rozdiel?
Odp.2: K dispozícii sú 3 masážne režimy, pozrite si rozdiel, ako je uvedené nižšie:

- 2 -

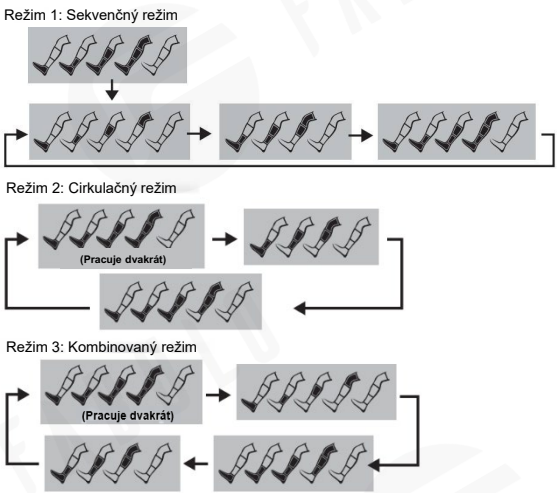

- Ot.3: Musí byť napájanie pri používaní zapojené do elektrickej zásuvky?
Odp.3: Nie, ovládač má nabíjateľnú batériu, ktorú môžete použiť kedykoľvek chcete. Plne nabitá batéria vydrží až 3-4 hodiny (v závislosti od režimu a intenzity).
- Ot.4: Čo mám robiť, ak cítim, že sila masáže je príliš slabá alebo príliš silná?
Odp.4: Intenzita je od 40 mmHg do 150 mmHg, vyberte si intenzitu, ktorá vám vyhovuje. Ak máte stále pociť, že je pri najnižšom nastavení príliš silná, prestaňte zariadenie používať, odporúčame vám, aby ste sa pred ďalším použitím poradili so svojim lekárom.
- Ot.5: Ako dlho ho mám používať?
Odp.5: Odporúča sa používať raz alebo dvakrát denne, nie viac ako 30 minút naraz. Môžete ho však používať dlhšie, ak sa cítite príliš unavení a chcete, aby masivoval dlhšie, aby ste zapracovali na bolesti.
- Ot.6: Prečo je na zadnej strane ovládača zadný kryt?
Odp.6: Zadný kryt možno použiť na vloženie do pripojovacích portov vzduchovej hadice spolu s ďalšou vzduchovou hadicou, čo umožňuje samostatnému fungovaniu jednej manžety.

- 3 -

- Ot.7: Môžem prístroj použiť len na jednu nohu?
Odp.7: Áno môžete. Pomocou silikónovej gumy zablokujte jeden vzduchový otvor a potom môžete nosiť jeden z rukávov na požadovanej nohe. Odporúčame použiť oba návleky súčasne pre lepšiu úľavu.
- Ot.8: Prečo ovládač vydáva zvuk?
Odp.8: Zvuk vychádza z fungujúceho vzduchového čerpadla v ovládači, ktoré nepretržite dodáva vzduch do vzduchových vakov v rukávoch, je to slabý zvuk a to je normálny jav.
- Ot.9: Kedy mám použiť tento produkt?
Odp.9: Tento produkt tlačí krv do prietoku, účinne odstraňuje svalovú bolesť a únavu, môžete ho použiť kedykoľvek chcete. Môžete ho použiť pred tréningom na zahriatie svalov, po cvičení pre lepšiu a rýchlejšiu regeneráciu alebo keď sa vrátite domov po dlhom pracovnom dni.

I Technické údaje:

Model	S9061B
Názov	Nabíjateľný systém rekonescencie kompresiou vzduchu
Adaptér	Vstup AC: 100-240 Voltov, AC 50/60Hz; DC Výstup: 12V 2A
Menovitý výkon:	24W
Režim kompresie	3 režimy: Postupnosť / Cirkulácia / Kombinácia
Úroveň intenzity/ rozsah tlaku	40-150mmHg
Čas	15~60 minút
Hmotnosť výrobku	2,92 KG
Hmotnosť balenia	4,38 KG
Typ rukávov	4 - Komorový rukáv - Chodidlo / Spodná časť lýtky / Horná časť lýtky / Stehno
Batéria	2500mAh Kapacita batérie: 3-4 hodiny Doba použitia 2,5 hodiny Doba nabíjania
Veľkosť lopánok	Vnútrošný šev: 33,9 palca; Maximálna šírka stehien: 28,3 palca; Maximálna šírka chodidla: 14 palcov

- 4 -


I Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenie
Nefunguje a obrazovka je vypnutá.	Napájanie nie je zapnuté	Zatlačením tlačidla napájania zapnete ovládač
	Batéria je vybitá	Prosím, úplne nabite batériu
Obrazovka je zapnutá, ale rukávy nefungujú.	Ak zapnete tlačidlo napájania "⏻", ale nestlačíte tlačidlo Štart/Pauza "▶", ovládač sa po 2 minútach vypne.	Začnite stlačením tlačidla ▶ Štart/Pauza.
	K regulátoru pripojte iba jednu vzduchovú hadicu.	Pripojte 2 vzduchové hadice rukávov (alebo 1 vzduchovú hadicu rukávu a zadný kryt ovládača) k ovládaču
	Vzduchové hadice nie sú úplne pripojené	Uistite sa, že sú vzduchové hadice správne a úplne pripojené k ovládaču (všimnite si stranu, na ktorej je tlačidlo smerom „HORE“).
	Stlačením tlačidla Štart/Pauza prerušíte používanie	Začnite stlačením tlačidla ▶ Štart/Pauza
Prerušenie alebo zastavenie pumpovania počas prevádzky.	Rukávy sú poškodené	Skontrolujte, či z rukávov neuniká vzduch, ak áno, kontaktujte náš zákaznický servis.
	Batéria je vybitá	Prosím, úplne nabite batériu
	Čas ošetrovania vypršal	Zariadenie sa automaticky vypne, keď uplynie prednastavený čas, v prípade potreby stlačte tlačidlo napájania a spustíte novú reláciu.


- 5 -

I Opis produktu


I Riadiaca jednotka

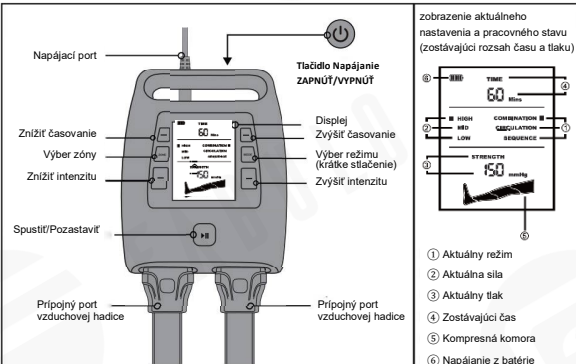

I Obrazovka

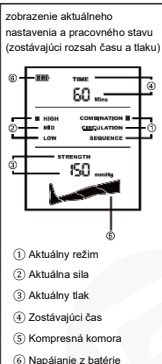

I Masážny rukáv

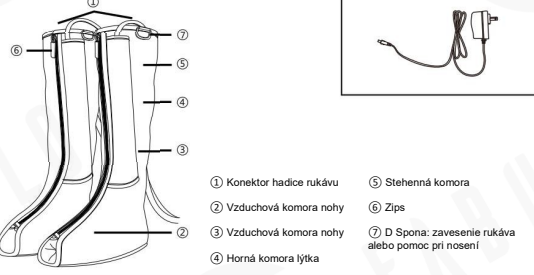

I Adaptér



- 6 -

I Návod na použitie

Pred používaním tohto produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia. Ak chcete dosiahnuť lepšiu masáž, používajte prístroj podľa pokynov.

- Uistite sa, že sú obe vzduchové hadice zapojené do ovládača, táto strana je „HORE“.

I Možnosť napájania z batérie

- Slabá batéria → Plná batéria
- JS Nabíjací port
- Pred prvým použitím úplne nabite batériu 2-2,5 hodiny.
 - Ak chcete nabiť batériu:
 - Pripojte adaptér k JS portu nabíjania na základni ovládača.
 - Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.
 - Indikátor batérie na obrazovke ovládača zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia.
 - Stav batérie:
 - Keď sa vybije, indikátor batérie je prázdny a zariadenia sa vypnú.
 - Keď sa batéria nabíja, indikátor batérie stále bliká.
 - Po úplnom nabití prestane indikátor batérie blikat.
 - Skôr ako necháte zariadenie dlhšiu dobu nepoužívané, plne ho nabite. Odporúča sa nabíjať každých 5 mesiacov, aby ste predišli poškodeniu batérie v dôsledku vypadkov napájania.
 - Nasadte si rukávy správne na nohu. Medzi rukávami nie je rozdiel medzi ľavou a pravou stranou.




- 7 -

- * Pred obliečením sa uistite, že je zips úplne zapnutý, nikdy sa nepokúšajte použiť systém s čiastočne alebo úplne rozopnutým zipsom
- * Na rýchle nasadenie môžete použiť D pracku na vrchu rukáva.

- Nájdite si pohodlnú polohu v sede, oprelý alebo v ľahu. Dlhो zatlačte tlačidlo napájania "⏻" na tri sekundy.
- Zaznie zvuk „Di“, obrazovka sa rozsvieti a zobrazí aktuálne nastavenie. Spustíte stlačením tlačidla ▶ Štart/Pauza.
- Začína sa predvoleným nastavením: Režim 1 (Sekvenčný režim), intenzita je 60 mmHg, časovanie 30 minút.

- Stlačením tlačidla režimu zmeníte režim masáže. 3 režimy voľiteľné, pozrite si rozdiel v sekcii A2 Často kladených otázok.

- Stlačením tlačidla z vyberiete zónu, ktorú chcete masírovať, môžete uzamknúť zosilnenie ktorým chcete masírovať, len pre jednu zónu. Ak chcete znova masírovať celú nohu, stlačte tlačidlo MODE a vychutnajte si masáž celej nohy.

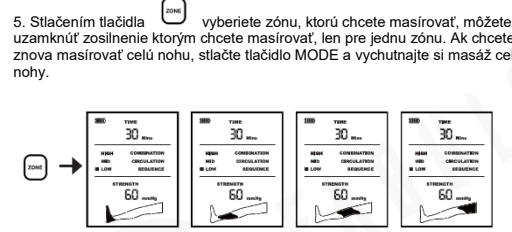


- 8 -

- Stlačením tlačidla intenzity nastavíte intenzitu tlaku vzduchu, možno zvoliť 40 mmHg-150 mmHg. *Pri prvom použití odporúčame začať s nízkou intenzitou a postupne zvyšovať, keď si na ňu zvyknete.
- Stlačte tlačidlo času, aby ste zmenili časovanie, na výber je čas ošetrovania 15-60 minút. Čas je možné kedykoľvek počas relácie upraviť.
- Prístroj sa automaticky vypne po uplynutí doby ošetrovania, môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo napájania, ak si chcete užiť viac alebo ukončiť masáž skôr.

I Poznámky po použití

- Ak ste skončili s používaním zariadenia, vypnite riadiacu jednotku stlačením vypínača a odpojte adaptér od riadiacej jednotky a zásuvky.
- Odpojte hadicu od riadiacej jednotky stlačením tlačidla na jej vrchu a odťiahnutím.
- Všetko príslušenstvo zabalte do pôvodného balenia alebo do úložnej tašky.

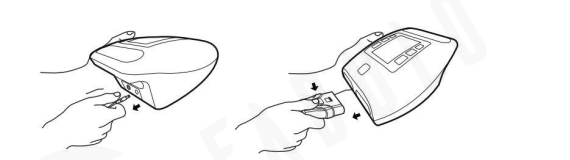

- 9 -

I Čistenie

- Pri čistení prístroja nezabudnite vypnúť napájanie.
- V prípade znečistenia utrite riadiacu jednotku, rukávy a hadice vlhkou, čistou handričkou.
 - Dôkladne osušte čistou handričkou.
 - Na čistenie prístroja nepoužívajte benzín, alkohol, riedidlo a iné dráždivé kvapaliny, mohli by to spôsobiť poruchu alebo sa komponenty poškodia alebo vyblednú.
 - Nedovoľte, aby sa do hadíc dostali cudzie predmety.
 - Nečistite chemicky.

I Skladovanie a údržba

- Tento výrobok sami nerozoberajte. Nemá žiadne časti opraviteľné používateľom. Ak je potrebný servis alebo opravy, kontaktujte zákaznický servis.
- Uchovávať mimo dosahu dočiat, detí a ľudí bez možnosti samostatného používania.
- Neumiestňujte ho do prostredia s vysokou teplotou a vlhkosťou.
- Vyhýnajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabráňte prepichnutiu vzduchových vakov a hadíc ihlami.
- Nekladte naň ťažké veci.
- Udržujte otvorené porty riadiacej jednotky, hadicové prepojenie a napájanie bez nečistôt.
- Nedovoľte, aby sa na riadiacej jednotke alebo prepojení hadíc hromadili vlákna alebo prach. Ak sa na ňom nahromadia vlákna alebo prach, pred použitím utrite systém suchou handričkou.

I Likvidácia

Pri likvidácii odpadu dodržujte miestne predpisy

I Obsah balenia

- 2x Masážne rukávy
- 1x Ovládač
- Napájací adaptér/AC100-240V, 50/60Hz; DC12V2A
- 1xPoužívateľská príručka
- 1xPrenosná taška