

Návod na obsluhu

(Číslo verzie: 2013-4-01)



Upozornenia:

Pred použitím tohto produktu si, prosím, prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové postupy v návode na použitie. Dodržiavanie návodu vám pomôže bezpečne a jednoducho ovládať toto zariadenie; Vždy, prosím, používajte zariadenie v prísnom súlade s poskytnutým návodom; Uschovajte si, prosím, návod a záznam zákazníka v bezpečí; Ak narazíte na problémy alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania alebo bezpečnej prevádzky zariadenia, ihneď kontaktujte svojho predajcu, prosím. Vaša bezpečnosť a spokojnosť je našim prvoradým cieľom.

1 Úvod

Zváracie zariadenie je súčasťou sterilizátora. Ponúka nasledujúce výhody: stálu kapacitu, jednoduchú obsluhu, bezpečnú obsluhu, nižšiu náročnosť na údržbu a príjemný vzhľad. Je veľmi dobre akceptovaný vo všetkých nemocniciach a klinikách. Kľúčové vlastnosti produktu sú: keď sa zmení tlak, prístroj sa dokáže prispôbiť na najlepšiu teplotu zvárania.



Obr. 1-1

- 1 Popis dielov:
Prítlačná doska
Zváracia doska
Sieťový vypínač
Rukoväť nožov
Indikátor ohrevu
Gombík nastavenia teploty
Stojan



Obr. 1-2

2 Napájací kábel

Pripojte napájanie AC230V/50HZ. Zapnite hlavný vypínač; Predhriatie prístroja bude trvať 2 minúty. Začnite používať, keď kontrolka zhasne.

3 Teplota zvárania

Prístroj má systém presného nastavenia teploty. Teplotu môžete nastaviť otáčaním nastaviteľného gombíka teploty. Ak používate aseptický obalový materiál (jedna strana je papier, druhá strana je nylon), gombík teploty by mal byť nastavený na 1/3 znaku aero. Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek, znížte teplotu, potom otočením gombíka v smere hodinových ručičiek, sa teplota zvýši. Keď kvalita zvaru dosiahne požadovanú úroveň, môžete ten istý baliaci materiál zvariť aj neskôr bez nutnosti nastavovania.

Toto tesniace zariadenie dokáže utesniť kryštálovo priehľadný materiál s vysokou kvalitou. Strana papiera by mala smerovať k strane tesnenia. Nedá sa zvärať fóliový materiál potrubiť, pretože tento materiál ľahko príľne k tesniacej tyči.

2 Návod na použitie

1 Prevádzka



Obr. 2 -1

Keď kontrolka zhasne, prístroj je pripravený na použitie.

UPOZORNENIE: Prevádzková teplota zváracej lišty je veľmi vysoká; dávajte pozor, aby ste sa priamo nedotkli lišty.

Pre optimálnu teplotu a kvalitu zvárania vyberte polohu nastavenia gombíka medzi 3 až 4. Priehľadné sterilizačné vrecká musia byť umiestnené medzi prítlačnú lištu a zváraciu lištu papierovou stranou nadol. Otočte a tlačte kľuku smerom nadol, kým sa vrecko riadne nezavariť.

Upozornenie: Ak vrecko/vak nebude dostatočne stlačené, kvalita zvaru nemusí byť prijateľná. Kľukou sa musí otočiť a držať zatlačenú smerom nadol asi 4 sekundy. Potom vrecko/vak odrežte a vráťte kľuku do vertikálnej polohy. Zváranie vrecka je dokončené. Ak je napájanie zapnuté, môžete vo zváraní pokračovať.

2 Odrévanie vreciek/vakov


Keď rýchlo zatiahnete za rúkoväť orezávača, rezná čepeľ odreže vrecko. Ak za rúčku orezávača potiahnete príliš pomaly, sterilizačné vrecko sa pokrčí a nebude možné ho správne odrezat'. Potiahnutím orezávača tam a späť môžete dokončiť rez vreciek/vakov.




Obr. 2.2

3 Vkladanie roliek vreciek


Rolku je možné umiestniť na stojan; koniec kotúča je možné vložiť zozadu medzi prítlačnú tyč a zväraciu tyč. Papierovou stranou nadol a uistite sa, že pásy zostanú vo vodiacej koľajničke, potiahnite pás dopredu, kým nebudete mať dostatočnú dĺžku na uzatvorenie nástrojov pre sterilizáciu. Potom vrecko zavarte a odrežte, aby sa operácia dokončila.

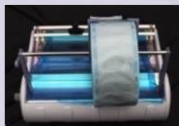

Obr. 2-3

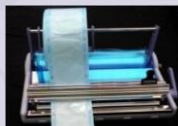

Obr. 2-4

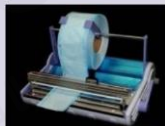

Obr. 2-5

4 Technologické parametre


Vstupné napätie:
Podľa typového štítku

Výkon: 500VA

Poistka: T5A, AC250V
Šírka zvärania: 250 mm max
Šírka prítlačnej lišty: 10 mm
Čistá hmotnosť: 5.5 Kg

5 Stojan


Skontrolujte, prosím, podľa nižšie uvedených krokov (1,2,3); dva držáky sa najskôr vložia do drážky a potom sa osadí tyč.

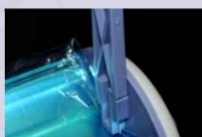

Obr. 5-1



Obr. 5-2

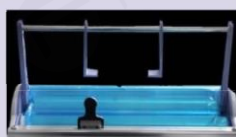

Obr. 5-3

6 Príslušenstvo



Obr. 5-1

Nie	Názov	Jednotka	Množstvo
1	Šesthranný kľúč	Kus	1
2	Čepeľ orezávača	Kus	2
3	Napájací kábel	Kus	1
4	Tkanina na farbenie pri zväraní	Kus	1

7 Údržba

1 Výmena prítlačnej lišty



Obr. 6-1



Obr. 6-2

UPOZORNENIE: Napájací kábel musí byť odpojený a aby ste predišli poraneniu popálením, pred vykonaním akejkoľvek údržby musíte nechať zväraciu lištu vychladnúť (to je veľmi dôležité pri údržbe prístroja, alebo keď sa ho pokúšate opraviť)



Obr. 6-3



Obr. 6-4



Obr. 6-5

1 Výmena čepeľí

Pomocou šesthranného kľúča uvoľnite dve skrutky na posuvnej lište čepele, snímte posuvnú časť z tyče, z posuvnej časti odmontujte kryt čepele, potom môžete čepeľ vymeniť.

POZOR: Čepeľ orezávača je veľmi ostrá.

2 Výmena tkaniny na farbenie pri zväraní

Odstráňte posuvnú tyč; uvoľnite dve skrutky na prednej prítlačnej tyči, potom demontujte prednú a zadnú prítlačnú tyč a môžete vymeniť tkaninu na farbenie pri zväraní.

Obsah balenia

Č.	Diel	Množstvo	Poznámka
1	Hlavná jednotka	1 kus	
2	Napájací kábel	1 kus	
3	Balenie	1 meter	
4	Čepeľ orezávača	2 kusy	S=4
5	Šesthranný kľúč	1 kus	
6	Tkanina na farbenie pri zväraní	1 kus	
7	Tyč	1 kus	
8	Plastová doska	1 kus	