

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Sillon Classic 3




***PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE*.**

Táto príručka obsahuje podrobné informácie o obsluhu a údržbe zariadenia. Pred použitím zariadenia si prečítajte priložený návod na obsluhu. Používajte zariadenie podľa popisu. Uschovajte si tento návod a uistite sa, že všetky osoby, ktoré môžu zariadenie používať, sú s ním oboznámené.

Elektrická kozmetická posteľ Sillon je profesionálne zariadenie, ktoré je ideálne pre každý kozmetický salón. Ideálna na masáže, kozmetické ošetrenia a tiež fyzioterapiu. Posteľ je navrhnutá tak, aby poskytovala plné pohodlie pri ležaní na nej počas liečby. Posteľ sa skladá zo štyroch častí a odnímateľného vankúša. Na oboch stranách sedadla sú úchyty, na ktoré si môžete zavesiť diaľkové ovládanie, aby ste ho mali vždy po ruke.


Nosnosť výrobku: 150 kg

Maximálna nosnosť tela stoličky je 150 kg. Nezdvíhajte viac, ako je daná hmotnosť, ktorú stolička unesie. Neskáčte na operadlo a netlačte príliš na lakťové opierky, aby ste nepoškodili konštrukciu výrobku.

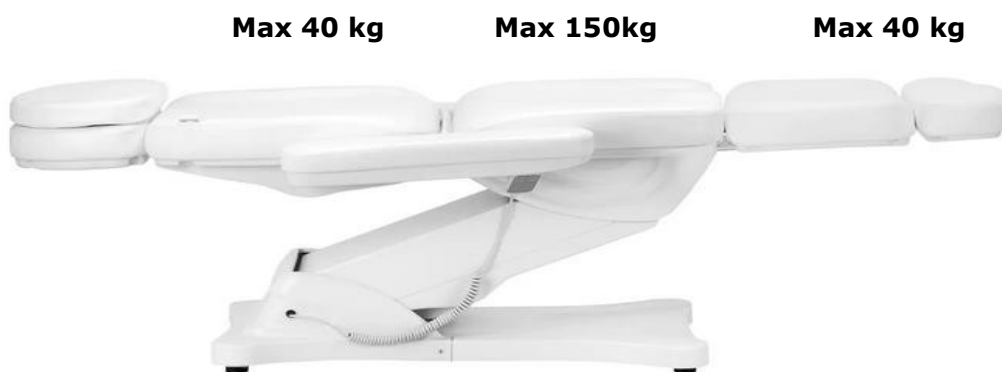

Pozor!

Na balenie sa používajú kartónové a vonkajšie krabice s celkovo 10 vrstvami papiera, ktoré poskytujú ochranu vašich produktov. Odporúčame uschovať si originálny obal pre budúce použitie, najmä pre vrátenie tovaru počas záručnej doby. Z bezpečnostných dôvodov, sú na zdvihnutie kozmetickej postele z krabice, potrebné dve osoby. Pri zdvíhaní stojte na oboch stranách opierky hlavy a opierky nôh kresla. Pamätajte, že posteľ je možné zdvihnúť iba z polohy opierky hlavy a opierky nôh, nie z oboch strán lakťovej opierky.

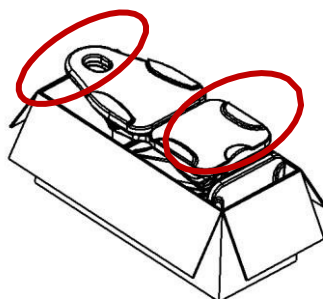

Pred použitím stoličky skontrolujte, či je obal neporušený a či nebol počas prepravy poškodený. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, informujte prepravnú spoločnosť alebo popredajný personál do 2 dní od prevzatia jednotky. Pri dodaní sa uistite, že všetko príslušenstvo je kompletne, či je príslušenstvo v čase dodania kompletne. Ak pri doručení zistíte, že nejaké príslušenstvo chýba, včas kontaktujte popredajný personál.


Elektrické kozmetické kreslo sa musí používať v uzavretých a suchých miestnostiach. Teplota v miestnosti by mala byť medzi +10 ° a -40 ° a relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť medzi 30 % a 75 %. Ak bolo elektrické kozmetické kreslo vystavené teplotám pod 0 °C, počkajte pred jeho použitím aspoň 5 hodín, aby zariadenie malo čas dosiahnuť izbovú teplotu.

Pred použitím elektrického kozmetického kresla si prečítajte návod a postupujte nasledovne:


1. Uistite sa, že boli odstránené všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že posteľ je v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite elektrické kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte zástrčku do vhodnej zásuvky.

Poznámka! Deti a neskúsené osoby nesmú toto zariadenie používať. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti elektrického kozmetického kresla. Z bezpečnostných dôvodov odpojte zariadenie zo siete a nenechávajte ho bez dozoru. Taktiež odpojte napájací kábel.

Rozmery zariadenia:

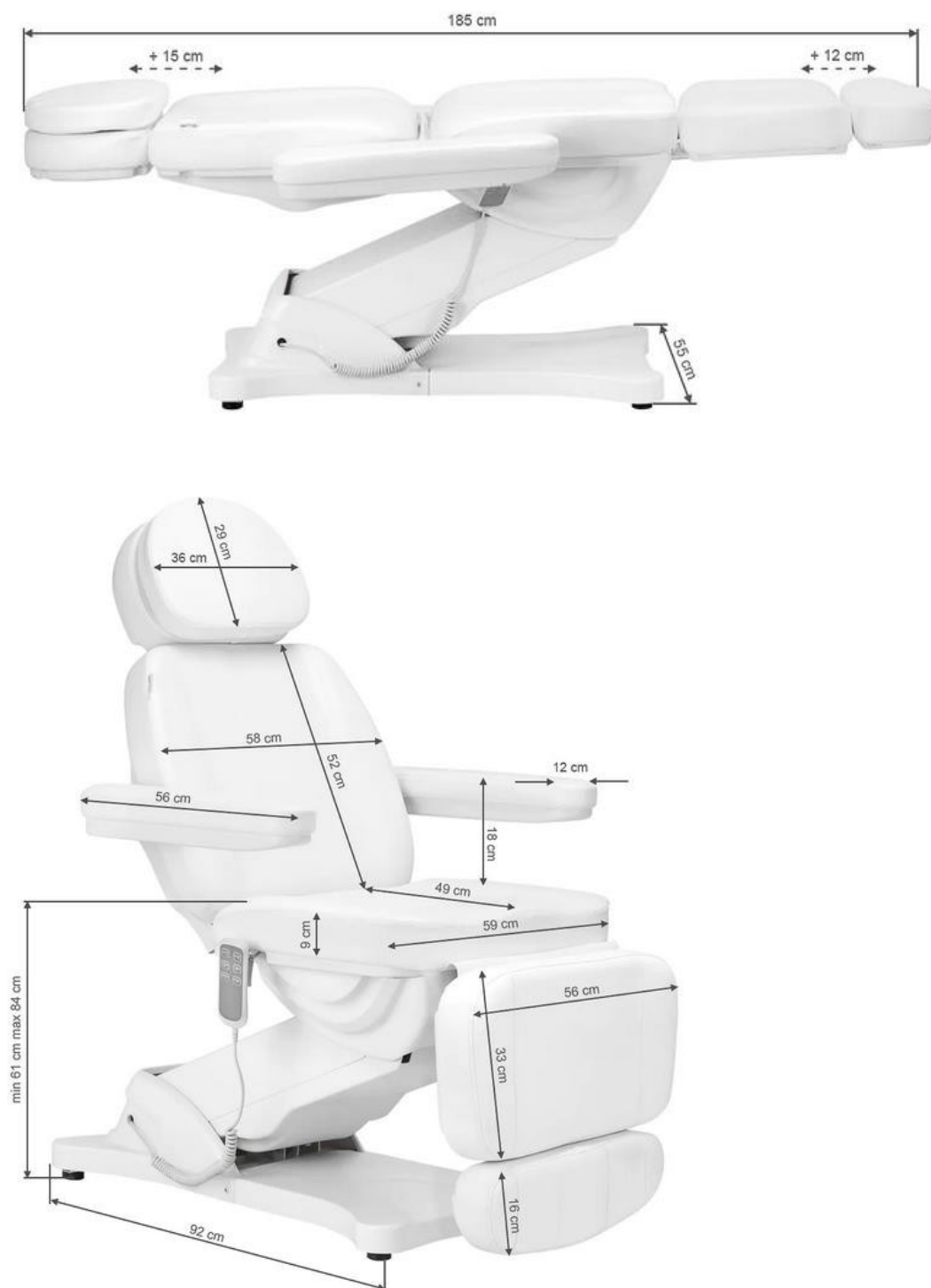

Konštrukcia zariadenia:

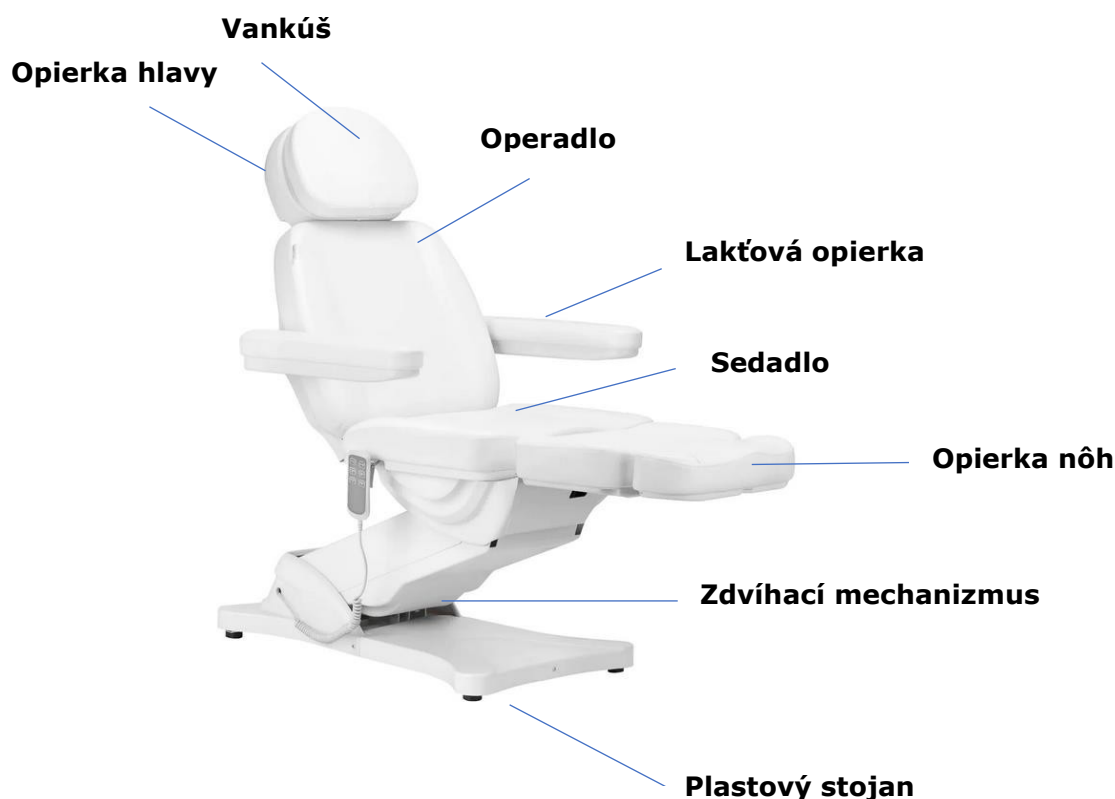

Upozornenie

1. Opierka na nohy nie je určená na unesenie plnej hmotnosti dospelého človeka.
2. Nesedzte priamo na laktovej opierke a opierke nôh.
3. Nepoužívajte elektrické gynekologické vyšetrovacie kreslo v blízkosti horľavých plynov.
4. Nezdvíhajte väčšiu váhu, ako stolička unesie.
5. Uistite sa, že vzdialenosť medzi zásuvkami nepresahuje 2 metre.

Poznámka

1. Z bezpečnostných dôvodov vždy zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
2. Nepriväzujte napájací kábel k jednotke, pretože zdvíhanie alebo ťahanie napájacieho kábla ho môže poškodiť. Uistite sa, že napájací kábel sa dá v prípade núdze ľahko odpojiť.
3. Pred premiestnením elektrickej kozmetologickej postele odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, posteľ nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
5. Nedovoľte osobe, ktorá nevykonáva daný postup, ovládať diaľkový ovládač.
6. Neumiestňujte žiadne predmety pod stoličku.
7. Uistite sa, že okolo stoličky je dostatok voľného miesta, aby sa dala voľne skladať a rozkladať.
8. Uistite sa, že v blízkosti kresla sa nenachádzajú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
9. Zariadenie sami neupravujte. Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Používanie zariadenia

Prístroj má funkciu vyhrievania sedadla a operadla, ktorá umožňuje uvoľnenie svalov a odpočinok počas ošetrenia. Ak chcete zapnúť vyhrievanie, jednoducho vyberte ikonu vyhrievania na ovládacom paneli a stlačte ju. Opätovným stlačením sa vyhrievanie vypne.




1. Pripojte napájací kábel k externému zdroju napájania 110 V ~ 240 V.

Spôsob inštalácie lakťovej opierky:

Sedadlo musí byť vo vodorovnej polohe, aby sa naň dali nainštalovať lakťové opierky. Zasuňte lakťovú opierku do otvoru umiestneného na boku operadla. Lakťová opierka by mala byť pevne pripevnená. Otočte ním doprava alebo doľava, aby správne zapadol na svoje miesto. To isté urobte s druhou lakťovou opierkou.


Lakťová opierka je kolmá na zem (bez ohľadu na uhol postele). Dá sa otočiť o 180°.

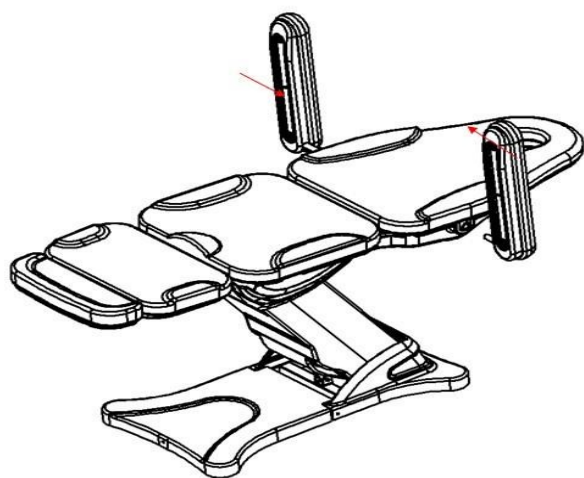

1. Funkcia manuálneho ovládania (výška zdvihu: posteľ je 58 ~ 82 cm od zeme)




2. Funkcia manuálneho ovládania (uhol zdvihu operadla 0-80 °, uhol zdvihu opierky nôh 0-90 °)

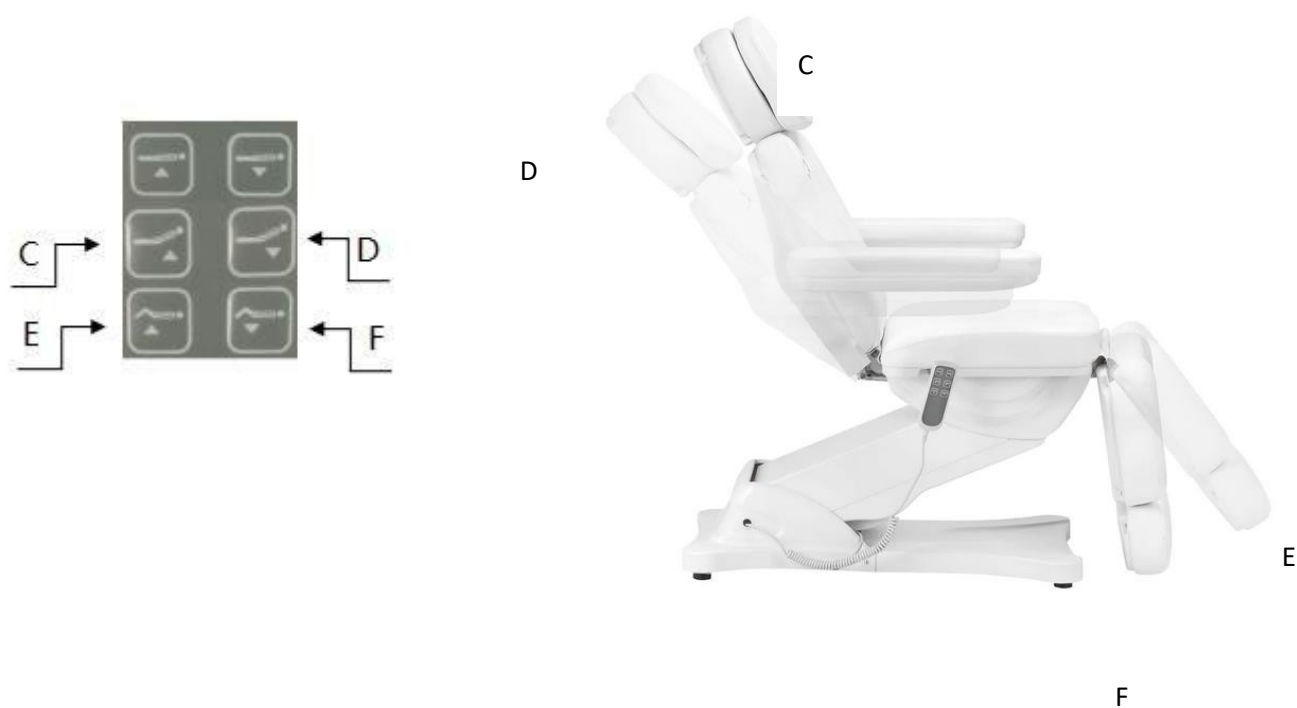

3. Funkcia zasúvania opierky nôh (dĺžka zasúvania opierky nôh 0~12 cm)

0 ~ 12cm

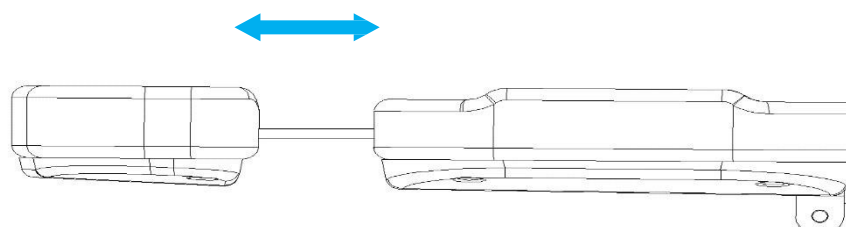

Čistenie a dezinfekcia zariadenia:

- Pred čistením zariadenie odpojte zo siete.
- Pre udržanie povrchu v dobrom stave ho pravidelne čistite. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a dezinfikovať. Odporúča sa vykonať dôkladnú dezinfekciu raz mesačne.

I Kovové a plastové povrchy

- Na čistenie kovových a plastových povrchov a ovládacích prvkov ich utrite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko dostupných miest alebo rohov bude dobre fungovať malá kefka. Na čistenie zariadenia nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom zariadenie dezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Najlepšie bude čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť amoniak a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhýbajte sa roztokom na báze chlóru.

III Natreté alebo chrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné trysky (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite zariadenie pri vysokej teplote a vysokej vlhkosti a nevystavujte ho podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii kvapalinami.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá a kyseliny.

IV Povrch kresla

- Povrch stoličky rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou jednotku odpojte zo siete.

1. Opravy by mali vykonávať skúsení a výrobcom autorizovaní pracovníci. Opravy vykonané neoprávneným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte iba originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Nepoužívajte elektrickú kozmetickú posteľ ani príslušenstvo, ak nefungujú správne.
4. Všetky údržbárske a opravárenské práce musia byť zdokumentované.

Opatrenia pri údržbe

Ovládacie prvky a ich zapojenie kontrolujte raz týždenne. Aspoň raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich vecí:

1. Napájací kábel a jeho pripojenie
2. Zapojenie motora
3. Ovládaciú skrinku a jej zapojenie
4. Či je pripojené príslušenstvo
5. Normálna prevádzka uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Otváranie alebo výmenu zdvíhacieho zariadenia/riadiacej jednotky môžu vykonávať iba skúsení alebo autorizovaní pracovníci.

Ak je ktorákoľvek časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom informujte servisné oddelenie.

Riešenie problému

Problém	Riešenie
Manuálne ovládanie nereaguje	Skontrolujte, či nie je uvoľnené rozhranie pripájajúce vedenie manuálneho ovládania (Skontrolujte, či nie je problém s doskou plošných spojov) nezabudnite označiť pôvodnú polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Prepnite polohu zástrčky motora

Ak chcete vymeniť ovládaciu skrinku a objednať si ďalšie náhradné diely, kontaktujte servisné oddelenie a pred kontaktovaním opíšte problém:

1. model
2. dátum nákupu

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie pre použitie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia iba kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte použiť na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetok servis a opravy smie vykonávať len pracovník autorizovaného servisu
3. Zariadenie neinštalujte ani neobsluhujte v blízkosti tekutín, vlhkých priestorov alebo s mokрыmi rukami – aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte zariadenie zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o. o.:
a) do prístroja sa dostala kvapalina, b) prístroj vydáva zvláštny zápach, dymí alebo vydáva zvláštne zvuky, c) je poškodený napájací kábel, d) prístroj sa prevrátil alebo je poškodený jeho kryt.
5. Neukladajte žiadne predmety na káble. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so zariadením.
7. Do otvorov v zariadení nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Ak zariadenie spadne, môže sa poškodiť.
9. Pre zaručenie uvedenej životnosti zariadenia sa odporúča dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením vypínača (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí zodpovedať špecifikácii na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávne fungovanie prístroja, jeho poškodenie alebo dokonca spálenie.

Pripomienka:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko
– predídete tak nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností a znalostí zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby pochopili súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o jeho používaní.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickými spotrebičmi môže predstavovať riziko straty zdravia alebo smrti, preto zariadenie používajte a uchovávajte mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Použité elektrické spotrebiče, armatúry a obaly zlikvidujte v strediskách pre recykláciu surovín v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Nevyhadzujte elektrické spotrebiče do nádob s domovým odpadom. Dodržiavajte pravidlá likvidácie tohto typu zariadenia. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických

zariadení by sa mal elektroodpad zbierať oddelene a následne odosielať do zberných stredísk pre elektroodpad a odpad z elektrických zariadení. Na konci svojej životnosti obsahujú staré spotrebiče plnohodnotné recyklovateľné komponenty, preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by mali byť odovzdané na príslušných zberných miestach, rovnako ako ich môžete odovzdať spoločnosti ACTIVSHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A DOPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách medzi (-) 20 °C a (+) 50 °C iba v originálnom balení. Zariadenie uchovávajte v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať a spadnúť, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom alebo poveternostným vplyvom.