


ACTIVESHOP®


NÁVOD NA POUŽITIE

ELEGANTE 882 SKIN SCRUB + DARSONVAL

Model 862 HF/M-882

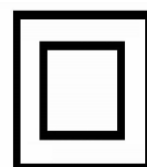

Technické údaje:

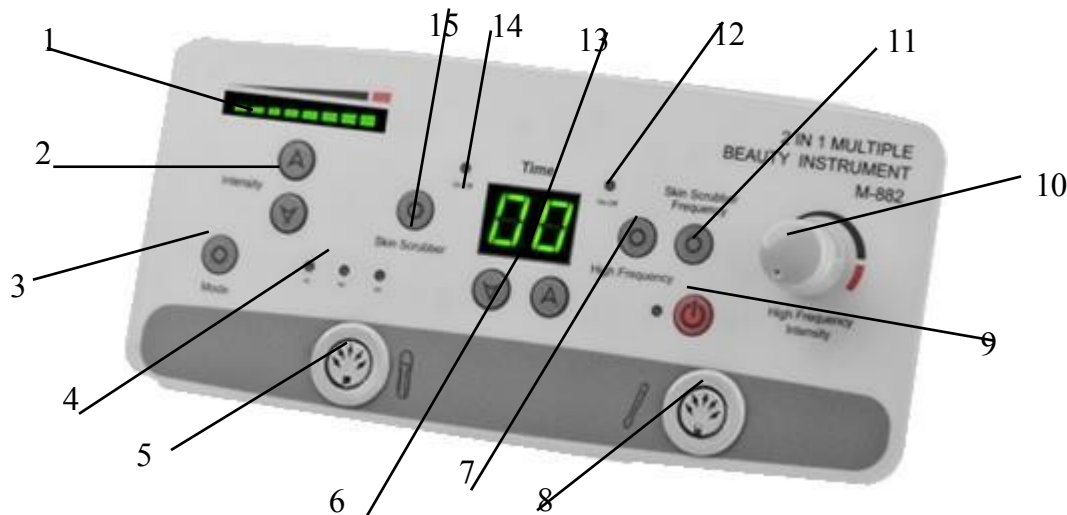

1. Indikátor intenzity
2. Nastavenie intenzity
3. Výber možnosti ošetrenia pre kavitačný peeling (M1- kavitačný peeling, M2- sonoforéza, M3- sonoforéza s mikromasážou).
4. Prevádzkové svetlo pre príslušnú možnosť ošetrenia kavitačným peelingom,
5. pripojenie kavitačného peelingu,
6. Úprava prevádzkového času,
7. výber možnosti liečby - darsonval,
8. Pripojenie darsonvalu,
9. Spustenie/zastavenie darsonvalu/kavitácie peelingu,
10. Nastavenie intenzity darsonvalu,
11. Nastavenie výkonu kavitačnej peelingovej špachtle
12. Svetlo pre prevádzku darsonvalu
13. Zobrazenie času
14. Svetlo pre kavitačný peeling,
15. Výber možnosti ošetrenia - kavitačný peeling

DARSONWAL

D'Arsonvalové prúdy sú jednou z variácií vysokofrekvenčných prúdov. Zariadenie produkuje ozón pomocou elektrostatických výbojov, ktoré vznikajú v peletoch.

Pôsobenie d'Arsonvalových prúdov je založené najmä na účinku na cievy a vegetatívne nervové zakončenia. Iskrenie, ktoré vzniká medzi elektródou a kožou, spôsobuje rozšírenie ciev a ovplyvňuje podkožné tkanivo. Vzniknutý ozón má dezinfekčný účinok. V prístroji sú na výber 3 pelety. Ošetrovanie sa vykonáva 5 až 7 minút.

INDIKÁCIE:

- Poruchy kožných zmyslov,
- alopecia areata,
- Stimulácia obehového systému,
- Dezinfekcia kože,

KONTRAINDIKÁCIE:

- Tehotenstvo
- Hypertenzia
- Edém
- Nervová hyperaktivita
- Ochorenia srdca
- Zápalové stavy kože
- Horúčka
- Astma

- Epilepsia
- Kovové implantáty
- Ružovka
- Rozšírené cievy
- Alergické kožné ochorenia

Návod na použitie

1. Pripojte rukoväť z darsonwala k vstupu č. 8.
2. Pomocou tlačidla 6 nastavte čas ošetrenia.
3. Stlačte tlačidlo 7, rozsvieti sa kontrolka pripravenosti darsonwala (12).
4. Nastavte intenzitu ošetrenia pomocou gombíka (10).
5. Stlačením tlačidla 9 spustíte ošetrenie.

Kavitačný peeling je predovšetkým bezbolestné čistenie pokožky pomocou ultrazvukových vibrácií. Umožňuje dôkladné odstránenie prebytočného kožného mazu z pórov a vlasových folikulov, ako aj zbavenie sa čiernych bodiek.

Pri použití peelingu dochádza k javu kavitácie, ktorý nastáva, keď sa ultrazvuk dostane do kontaktu s kvapalinou, potom sa vytvoria mikroskopické bublinky plynu a séria chemických procesov, ktoré majú za následok rozpad odumretých buniek rohovej vrstvy.

INDIKÁCIE

- Zvýšenie tvárového oválu a brady,
- spevnenie štruktúry pokožky,
- Vyhladenie povrchových vrások,
- Redukcia "vačkov" pod očami a "kurích ôk",
- rekonštrukcia kolagénu,
- terapia proti starnutiu - prevencia,
- redukcia nečistôt, rozšírených pórov,
- spevnenie štruktúry pleti.
- Čistenie pleti.

Návod na použitie


1. Zapojte kavitačnú peelingovú špachtľu do vstupu 5,
2. Pomocou tlačidla 6 vyberte čas ošetrenia,
3. Vyberte typ ošetrenia pomocou tlačidla 3,
4. Vyberte intenzitu ošetrenia pomocou tlačidla 2 (na displeji sa zobrazí indikátor intenzity 1.),
5. Stlačte tlačidlo 15, rozsvieti sa kontrolka pripravenosti na kavitačný peeling (14),
6. Stlačením tlačidla 9 spustíte ošetrenie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte an . autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

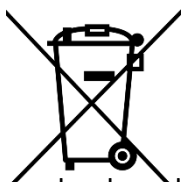

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použitie elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES

o odpade z elektrických a elektronických zariadení, sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.