

# Návod na použitie

## Galvanický prístroj Silverfox F-805



## Obsah/Content

<b>1. Úvod</b> .....	3
<b>1.1 Informácie o tomto návode</b> .....	4
<b>2. Obsah dodávky a štruktúra</b> .....	5
<b>2.1 Obsah balenia</b> .....	5
<b>2.2 Údržba a montáž</b> .....	5
<b>2.3 Technické údaje</b> .....	5
<b>3. Účel použitia</b> .....	6
<b>3.1 Použitie</b> .....	6
<b>3.2 Bezpečnostné pokyny</b> .....	7
<b>4. Riešenie problémov</b> .....	8
<b>4.1 Starostlivosť a údržba</b> .....	8
<b>4.2 Možné poruchy</b> .....	8
<b>4.3 Likvidácia</b> .....	8
<b>1.Prolog</b> .....	11
<b>1.1 About this manual</b> .....	12
<b>2. Content and construction</b> .....	13
<b>2.1 Content of the packaging</b> .....	13
<b>2.2 Construction</b> .....	13
<b>2.3 Technical specifications</b> .....	13
<b>3. Intended use</b> .....	14
<b>3.1 Use</b> .....	14
<b>4. Maintenance and troubleshooting</b> .....	17
<b>4.1 Maintenance</b> .....	17
<b>4.2 Possible disorders</b> .....	17
<b>4.3 Disposal</b> .....	17

# 1. Úvod

Vážený zákazník!

Ďakujeme vám, že ste sa pri výbere prístroja na kozmetické ošetrovanie alebo komponentov výbavy rozhodli pre naše produkty.

Náš tím dôsledne skontroloval kvalitu všetkých našich produktov ešte pred ich dodaním.

Radi by sme vás chceli upozorniť, že na všetky naše produkty sa vzťahuje dvojročná záruka. Vaša faktúra slúži ako záručný list.

Ak si želáte ďalšie informácie alebo ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na náš tím. Vašej požiadavke sa budeme venovať okamžite.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické úpravy prístrojov bez predchádzajúceho oznámenia. Ak v tomto návode objavíte chyby, oznámte nám to e-mailom, aby sme ich mohli opraviť.

S pozdravom

Tím Mimera

## 1.1 Informácie o tomto návode

Výrobok je vybavený bezpečnostnými zariadeniami. Napriek tomu je však potrebné, aby ste si pozorne prečítali tento návod a výrobok používali len spôsobom, ktorý je v ňom opísaný. Predídete tým neúmyselným zraneniam alebo škodám.

Uchovajte tento návod pre ďalšie použitie.

Ak výrobok odovzdávate inému používateľovi, musíte mu spolu s výrobkom odovzdať aj tento návod.

### Symboly:



Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvo poranenia.



Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

Výstražné slovo **NEBEZPEČENSTVO** upozorňuje na možné vážne poranenia a ohrozenie života.

Výstražné slovo **VÝSTRAHA** vás upozorňuje na možné poranenia a vážne vecné škody.

Výstražné slovo **UPOZORNENIE** vás upozorňuje na možné ľahšie poranenia alebo poškodenia.


## 2. Obsah dodávky a štruktúra

### 2.1 Obsah balenia

Využitím galvanického prúdu umožní ionofóreza účinným látkam cielene preniknúť do pokožky. Zlepšuje prekrvenie, intermediárny metabolizmus, absorpčnú schopnosť pokožky, aktivuje regeneračný proces a zvyšuje hydratáciu pokožky.

Použitím pozitívneho a negatívneho prúdu dosiahnete hĺbkové ošetrovanie pokožky a následné vstrebanie pozitívne nabitých účinných látok pokožkou. Galvanický prúd sa používa na špeciálne ošetrovanie, ktoré osvieži a tonizuje a dodá pokožke najúčinnnejšie kozmetické zložky.

Množstvo	Diel
2	Galvanický ručný nástroj
1	Kábel
1	Napájací kábel
1	Hlavná jednotka

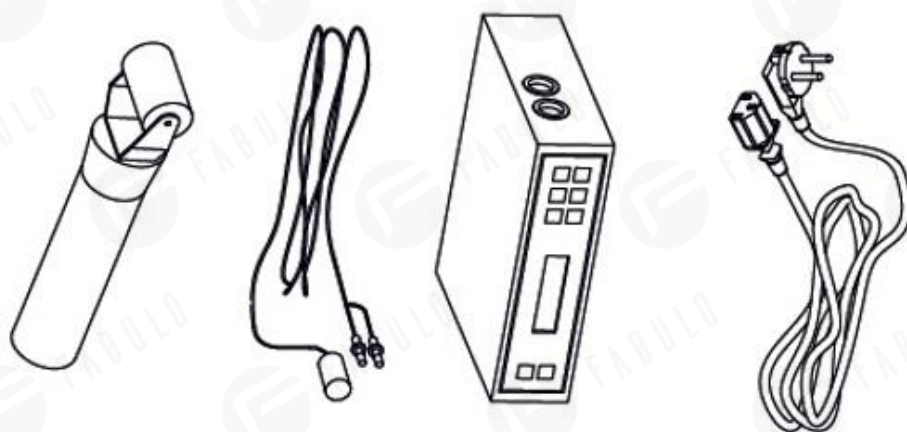

### 2.2 Údržba a montáž

1. Zasuňte kábel v zadnej časti prístroja.
2. Diely príslušenstva správne pripojte v prednej alebo zadnej časti.
3. Zapnite prístroj.
4. Podľa potreby upravte výstupnú intenzitu. Vo všeobecnosti by ste mali začať najprv s nízkou intenzitou a podľa potreby by ste ju mali zvyšovať.
5. Sondu držte pevne a stlačením tlačidla „START/PAUSE“ spustíte prevádzku.



### 2.3 Technické údaje

Hmotnosť	Výška	Dĺžka	Hz	Šírka	Výkon
2,2 kg	13 cm	25 cm	50/60	25 cm	3 W



## 3. Účel použitia

### 3.1 Použitie



Nebezpečenstvo pre deti  
Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.



Ohrozenie života elektrickým prúdom.

#### **Pred ošetrovaním:**

1. Vyčistite a vysušte ošetrovanú oblasť.
2. Zákazník drží kovový pól, ošetrojúca osoba drží rukoväť valčeka.
3. Zmena polaritý sond sa vykonáva prepínaním tlačidla „LEAD“ medzi polohami (+R) a (-G).
4. Valček zakryte kúskom balvnenej látky, ktorá bola predtým namočená do vhodného séra alebo emulzie. Sérum alebo emulziu je možné nanieť aj priamo na ošetrovanú časť pokožky.

#### **Pozor!**

- Nepoužívajte prístroj na tehotných ženách!
- Nepoužívajte prístroj na osobách s kardiostimulátorom (alebo inými elektrickými prístrojmi, prípadne prístrojmi na reguláciu rytmu).
- Nepoužívajte prístroj na osobách, u ktorých boli potvrdené problémy so srdcom, trpia trombózou, majú kožné problémy alebo nosia silikónové implantáty.
- Nepoužívajte prístroj na osobách, ktoré pred menej ako 6 mesiacmi podstúpili operáciu.

#### **Ošetrovanie:**

1. Vyčistite klientovi pokožku..
2. Podajte zákazníkovi kovový pól.
3. Zasuňte kábel v zadnej časti prístroja.
4. Diely príslušenstva pripojte správne na boku prístroja.
5. Zapnite prístroj.
6. Vykonaajte ošetrovanie pokožky.

Pozitívny pól / anódová galvanizácia má upokojujúce účinky  
Negatívny pól / katódová galvanizácia má stimulujujúce účinky

### 3.2 Bezpečnostné pokyny



#### Obsluha prístrojov deťmi a osobami s obmedzenými schopnosťami je nebezpečná

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho nedokážu používať bezpečne na základe svojich psychických, zmyslových alebo duševných schopností, alebo pre nedostatok skúseností alebo poznatkov. Nenechávajte deti bez dozoru a nedovoľte im hrať sa s prístrojom.
- Udržujte deti mimo prístroja a baliaceho materiálu!

#### Nebezpečenstvo súvisiace s elektrickým prúdom

- Nikdy neponárajte zástrčku a pripájací kábel do vody – hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí.
- Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.
- Prístroj zapájajte len do takej zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov. Sieťové napätie týchto kontaktov sa musí zhodovať s technickými údajmi prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, keď sú prístroj, napájací kábel alebo zástrčka poškodené. Nepoužívajte prístroj ani po páde.
- Nevykonávajte žiadne úpravy výrobku ani jeho napájacieho kábla. Opravy prenechajte len špecializovanej dielni alebo kvalifikovanej osobe, aby ste predišli vzniku nebezpečenstva.
- Skôr než začnete s premiestňovaním prístroja, odpojte ho od elektrickej prípojky.
- Presvedčte sa, že elektrická zástrčka je v dobrom stave a pripojená priamo do zásuvky. Vyhýbajte sa použitiu káblov s viacerými zásuvkami (predlžovacie šnúry).
- Prístroj nikdy nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami alebo vyťahovaním z elektrickej prípojky za napájací kábel.
- Prístroj nikdy nepoužívajte vo vlhkom alebo nevetranom prostredí, napríklad vo vlhkých miestnostiach alebo kúpeľni. Predídete tým škodám na elektrických komponentoch prístroja.
- Prístroj sa nesmie premiestňovať ťahaním za napájací kábel.
- Po ošetrovaní vypnite prístroj a vytiahnite napájací kábel.

#### Upozornenie

- Nesnažte sa sami otvoriť prístroj.
- Prístroj nikdy nepoužívajte vo vonkajších priestoroch – vplyvy počasia môžu spôsobiť škody.
- Po práci sa sondy musia vyčistiť, sterilizovať a skladovať na suchom mieste.
- Pri prevádzke tohto nástroja nepoužívajte látky obsahujúce kyseliny alebo zásadité látky.
- Nenechávajte sondy/ valčeky bez dozoru – môžu sa prehrievať.
- Nepokúšajte sa odpojiť generátor z ušľachtilej ocele od gumového držiaka. Výsledkom môžu byť neopraviteľné škody na generátore.
- Presvedčte sa, že zákazník odstránil šperky zo svojho tela a nemá v tele žiadne kovové implantáty.
- Toto ošetrovanie sa nesmie vykonávať na tehotných ženách, osobách s opuchnutou alebo citlivou pokožkou, alebo na osobách s rozšírenými cievami a osobách s hypersenzibilnou pokožkou či osobách, ktoré trpia alergiou.
- Dbajte na to, aby bola pokožka vlhká aj počas ošetrovania.

**Odložte výbavu na také miesto, kde k nej deti nemajú prístup.**

## 4. Riešenie problémov

### 4.1 Starostlivosť a údržba

**Upozornenie** | Škody na prístroji alebo poranenie v dôsledku znečistenia.

Dbajte na to, aby sa valčeky/ sondy nepoškodili. Na čistenie nepoužívajte drsné prostriedky. Poškodený povrch valčeka môže pri ošetrovaní spôsobiť škrabance na povrchu pokožky. Poškriabané oblasti môžu byť miestom tvorby baktérií a sťažujú sterilizáciu. Po ošetrovaní sa všetky kovové časti valčeka musia vyčistiť, sterilizovať a vysušiť. Následne skladujte tieto valčeky v boxe pre príslušenstvo, čím zabezpečíte ich ochranu.

#### Poznámka:

- Dbajte na to, aby bol prístroj vždy uložený na rovnom a plochom podklade.
- Prístroj nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. V opačnom prípade dochádza k poruchám funkčnosti.

### 4.2 Možné poruchy

Symptóm	Príčina	Riešenie
Prístroj nereaguje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napájací kábel nie je zapojený správne</li><li>• Prísun elektrického prúdu bol prerušený, napr. výpadkom elektrického prúdu</li></ul>	Vytiahnite zástrčku a znovu ju zapojte
Valčeky na sonde sa neotáčajú	Nesprávne čistenie	Odmontujte valčeky a poriadne ich vyčistite

### 4.3 Likvidácia

Prístroj aj obal boli vyrobené z cenných recyklovateľných materiálov.

Recyklácia znižuje objem odpadu a šetrí životné prostredie.

Obal likvidujte separovaným spôsobom. Využite miestne možnosti triedeného zberu papiera, kartónu a ľahkých obalov.



Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Vašou zákonnou povinnosťou je likvidovať použité prístroje a zariadenia oddelene od domového odpadu. Tento odpad môžete bezplatne odovzdať na zbernom mieste. Podrobnejšie informácie vám poskytne orgán obecnej alebo mestskej správy.