

Návod na použitie

Kozmetický ozonizér a ultrazvuk Elegante 872



Predstavenie ultrazvukovej prevádzky

Účel: zlepšiť krvný obeh, zvýšiť metabolizmus kožného tkaniva a urobiť pokožku lesklou a elastickou.

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	Jedna očná sonda, jedna tvárová sonda
Spôsob prevádzky	1. Po vyčistení pleti naneste na pleť primerané množstvo prípravku, upravte intenzitu výkonu a krúživými pohybmi po pokožke pohybujte. Prevádzkový čas spravidla nie je dlhší ako 15 minút.
Bezpečnostné opatrenia	
1. Pred použitím prístroja očistite pokožku miesta fyzioterapie, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do kože pomocou ultrazvuku alebo obmedzeniu prieniku ultrazvuku. 2. Použitie médium má prednostne určitú viskozitu, ktorá je priaznivá pre lepšie spojenie ultrazvukových vln a pokožky, pričom bráni dutinám, aby spôsobovali odraz a obmedzovali absorpciu pokožkou. 3. Každá fáza fyzikálnej terapie zvyčajne trvá 15 minút, príliš dlhý čas alebo nesprávne použitie môže spôsobiť zlú absorpciu pokožkou. 4. Tepelný stupeň sondy neznamená výstup ultrazvukového výkonu; malá koncentrácia vodného činidla alebo liečiva by nemala byť priamo infiltrovaná, inak to ľahko spôsobí vysušenie pokožky.	

Predstavenie prevádzky elektroliečby

Účel: urýchliť hojenie kožných rán vykonaním sterilizácie ozónom a znížením zápalu na koži s vyrážkami alebo inými problémami

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	1 elektroliečebná tyčinka s jednou hadičkou v tvare hada, jednou hríbovou rúrkou, jednou zakrivenou rúrkou
Spôsob prevádzky	1. Vložte vodič do držiaka vodiča. 2. V závislosti od ošetrovaného miesta vložte do elektroterapeutickej tyče rôzne tvary sklenených trubíc. 3. Zapnite napájanie a nastavte ovládač intenzity tak, aby fungoval. 4. Najprv po použití vráťte gombík intenzity na nulu a po vypnutí napájania vytiahnite sklenenú trubicu.
Bezpečnostné opatrenia	1. UV sklenená trubica by mala byť vždy čistá a suchá. 2. Pri vykonávaní elektroterapie by sa nemala príliš dlho zdržiavať na tom istom mieste, aby sa predišlo zjazveniu. 3. Pred ošetrovaním nenoste kovové šperky.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si zapamätajte tieto pokyny a spôsob prevádzky.

- Ak sa počas používania cítite neprijemne alebo zistíte niečo neobvyklé, okamžite vypnite napájanie a prestaňte ho používať.
- Prosím, nepoužívajte ho u dojčiat a umiestnite ho na miesta, ktoré nie sú pre dojčatá ľahko dostupné.
- Výrobok nesmie rozoberať a upravovať nikto, okrem nášho technického personálu.
- Po použití vždy vytiahnite zástrčku
- Neuchovávajte ho na nasledujúcich miestach.
 - ① Miesta, ktoré sú ľahko dostupné vetru, dažďu a miesta, kde sa ľahko hromadí voda.
 - ② Miesta, kde sa používa oheň, iné miesta s vysokou teplotou
 - ③ Vlhké a prašné miesta
- Nepoškodzujte napájací kábel, ani ho neupravujte. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho vymeňte.
- Pri používaní dodržujte predpísané napätie prístroja. Ináč to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Voda vnikajúca do ovládacieho panela produktu môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a skrat. Okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte odborníka, aby ho skontroloval.
- Keď sa nepoužíva, najskôr vypnite hlavnú jednotku a potom vypnite napájanie. Uistite sa, že ste vytiahli zástrčku. Zároveň vyčistite

príslušenstvo.

· Keď ho začnete používať, nenastavujte príliš vysokú intenzitu.

Používajte ho od nízkej intenzity.

· Ak koža sčervená alebo svrbí, prestaňte ho používať, aby ste zistili príčinu.

① Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, nie je dovolené doňho udierať, alebo ho nechať silno spadnúť na podlahu.

② Pri používaní prístroja sa príslušenstvo nesmie nachádzať príliš blízko

oka ani nesmie prechádzať cez očné bulvu. Tehotné ženy a pacienti so

srdcovým ochorením prístroj používať nesmú.

Distribútor: iM3, s.r.o., Malotejedská 515/8, 92901 Dunajská Streda, www.fabulo.sk