

Upozornenie

1. Ak chcete tento prístroj presunúť, je potrebné ho jemne zdvihnúť a opatrne ho položiť; v prípade zlyhania, naň prosím, silno neklopte, aby ste predišli poruche spôsobenej dopadom.
2. Ak chcete tento prístroj presunúť, je potrebné ho držať horizontálne, aby sa zabránilo vibráciám a nárazom.
3. Nestláčajte prístroj ani neumiestňujte ťažké veci na prístroj, aby sa zabránilo deformácii puzdra, poškodeniu alebo poruche.
4. Je potrebné zvoliť odpovedajúce pracovné napájanie v súlade so značkami na telese prístroja.
5. Tento nástroj sa nesmie používať v kúpeľni.
6. Aby ste zabránili nehode zásahom bleskom, keď hrmí, vypnite vypínač napájania a vytiahnite sieťovú zástrčku.
7. Nie je dovolené vstrekať žiadnu tekutinu do telesa prístroja, aby sa zabránilo poškodeniu prístroja v dôsledku skratu.
8. Ak sa prístroj nebude používať dlhší čas, je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Technické parametre

1. Prevádzkové napätie: AC 220V--AC 240V
2. Maximálny výkon celého prístroja: 20W.
3. Veľkosť balenia: 27*14*27 (D*Š*V) cm

Používateľská príručka pre Mikropočítačom riadený Kozmetický prístroj Mikrodermabrázia




Vážení zákazníci,

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt! Prejdite si, prosím, túto príručku pred použitím, aby ste zabezpečili maximálny výkon prístroja a bezpečnosť pri používaní. Vhodne uchovajte pre ďalšie využitie.

Funkcia

Zbavte sa starnutia pokožky, zlepšite textúru pokožky, vyblednutie, vylepšite jazvy a kožné nepravidelnosti; urýchlite krvný obeh a zmenšite veľké póry.

Popis ovládacieho panela

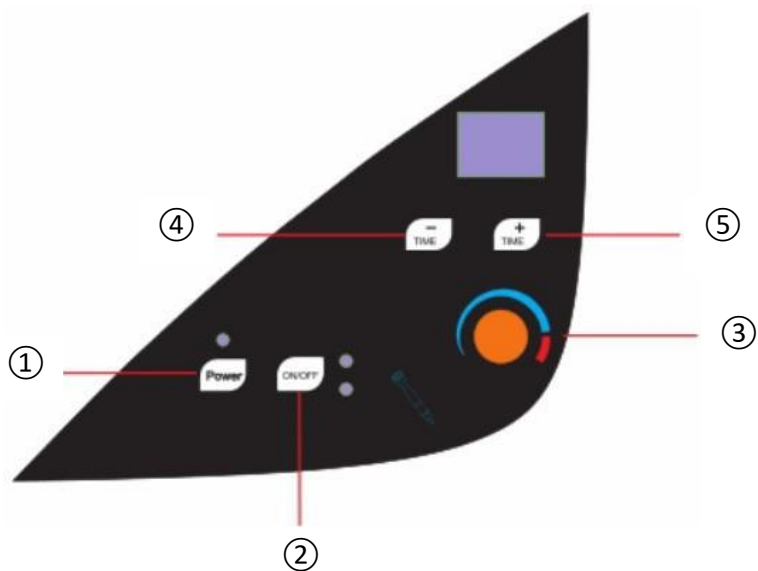

- ① Napájanie ② ON/OFF ③ Regulátor tlaku
④ Zníženie času ⑤ Zvýšenie času

Prevádzka

1. Vyberte si vhodný nastavtec a nainštalujte ho na hornú časť rukoväte, pripojte rukoväť do rozhrania prístroja pomocou hadice.
2. Zapojte, zatlačte ①, indikátor sa zmení na zeleno, čas ukazuje 30 (minút) a indikátor ② sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že prístroj je v pohotovostnom režime.
3. Stlačte ②, indikátor sa zmení na zeleno a druhý krát sa displej rozbliká, čo znamená, že prístroj začína pracovať.
4. Vyberte si vhodnú intenzitu od nízkej po vysokú úpravou regulátor tlaku v smere hodinových ručičiek.

Poznámky

1. Ak kozmetička vykonáva ošetrovanie sterilizovanými rukavicami, ruky by sa mali najprv očistiť a vydezinfikovať alkoholom
 2. Príslušenstvo by malo byť sterilizované a udržiavané čisté a suché.
- Prístroj je vybavený dermabráznymi nastavcami rôznych veľkostí pre použitie iného dielu. Inštalácia ako na obrázku nižšie:

