

Návod na použitie

Kozmetická ultrazvuková špachtľa Elegante 857

M-857A



Predstavenie prevádzky čistenia kože

Účel: exfoliovať a udržiavať rovnováhu pokožky

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	1 čistič pokožky
Režim 1 Čistenie (10 minút)	Po nanosení exportnej tekutiny na tvár na 5 minút, nakloňte sondu o 45 stupňov dopredu, aby ste odstránili odumretú pokožku, utrite tvár mokrým vatovým tampónom, aby bola tvár počas odstraňovania vlhká, a čistenie opakujte na tom istom mieste, nie viac ako 3 krát, aby nedošlo k sčervenaniu, nezdržiavajte sa na tom istom mieste pri prevádzke bez pohybu, inak obaríte zákazníka
Režim 2 Import (5 minút)	Na tvár je možné aplikovať vodnú emulziu, gél alebo esenciu a čistič pokožky sa nakloní o 45 stupňov, aby sa pokožka stiahla dozadu a stlačila, operáciu zopakujte
Režim 3 Zdvíhanie (5 minút)	Rozotrite gél na tvár, položte na pokožku vlhkú gázu a nakloňte čistič pokožky pod uhlom 45 stupňov, aby ste stiahli pokožku dozadu.
Kolokácia produktu	Derivovaná pleťová voda, esencia primordiálnych buniek, gél z aloe vera, gél na oživenie pokožky atď.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si zapamätajte tieto pokyny a spôsob prevádzky.

- Ak sa počas používania cítite nepríjemne alebo zistíte niečo neobvyklé, okamžite vypnite napájanie a prestaňte ho používať.
- Prosím, nepoužívajte ho u dojčiat a umiestnite ho na miesta, ktoré nie sú pre dojčatá ľahko dostupné.
- Výrobok nesmie rozoberať a upravovať nikto, okrem nášho technického personálu.
- Po použití vždy vytiahnite zástrčku
- Neuchovávajte ho na nasledujúcich miestach.
 - ① Miesta, ktoré sú ľahko dostupné vetru, dažďu a miesta, kde sa ľahko hromadí voda.
 - ② Miesta, kde sa používa oheň, iné miesta s vysokou teplotou
 - ③ Vlhké a prašné miesta
- Nepoškodzujte napájací kábel, ani ho neupravujte. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho vymeňte.
- Pri používaní dodržujte predpísané napätie prístroja. Ináč to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Voda vnikajúca do ovládacieho panela produktu môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a skrat. Okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte odborníka, aby ho skontroloval.
- Keď sa nepoužíva, najskôr vypnite hlavnú jednotku a potom vypnite napájanie. Uistite sa, že ste vytiahli zástrčku. Zároveň vyčistite príslušenstvo.
- Keď ho začnete používať, nenastavujte príliš vysokú intenzitu.
Používajte ho od nízkej intenzity.
- Ak koža sčervená alebo svrbí, prestaňte ho používať, aby ste zistili príčinu.
 - ① Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, nie je dovolené doňho udierať, alebo ho nechať silno spadnúť na podlahu.
 - ② Pri používaní prístroja sa príslušenstvo nesmie nachádzať príliš blízko oka ani nesmie prechádzať cez očné bulvu. Tehotné ženy a pacienti so srdcovým ochorením prístroj používať nesmú.