

Kozmetický naparovač Azzurro H1101 Sonia

●Funkcie výrobku

>Funkcie H1101

Nielenže má základné funkcie ako Kozmetický lónový Naparovač s Rastlinnou Aromaterapiou 1102, ale aj mikro-počítačové ovládanie, nastavenie pary tretieho stupňa, automaticky monitoruje hladinu vody. Tento prístroj má automatický monitorovací varovný systém najvyššej hladiny vody, v prípade nízkej hladiny vody na poškodenie ohrievacích skupín alebo vzniku skrytých problémov s rozprašovaním v dôsledku príliš vysokej hladiny vody. Okrem toho, eliminuje bezpečnostné problémy spôsobené naparovačom bez vody.





●Funkcia:

- 1) Zmäkčujú mŕtve bunky na povrchu pokožky na ďalšie čistenie.
- 2) Roztáhuje kožné póry pre hlboké čistenie.
- 3) Preniká do kožných pórov, zmäkčuje kumulovanú olejovú špinu, uhry, zvyšky kozmetiky a nečistoty, čím robia ďalšie čistenie účinnejším.
- 4) Pomáha kožným pórom vylúčiť toxín
- 5) Dočasne zmäkčuje vrásky.
- 6) Môže urýchliť krvné obehanie, pridáva vodu bunkám a zlepšuje metabolizmus a samoregeneráciu kožných buniek.
- 7) Použitím správneho čínskeho bylinného lieku počas liečby parou môže zlepšiť účinok liečby akné, čiernych škvŕn a vybieliť, dodať pokožke živiny.
- 8) S aromaterapiou stimuluje parciálny nerv a ošetruje fyzické funkcie efektívne.

●Špecifikácia a technické údaje:


Názov Výrobku	Kozmetický naparovač Azzurro H1101 Sonia
Č.Položky	H1101
Funkcia	lónový Naparovač/ Rastlinná/ Aromaterapia
Menovité napätie/Výkon	STRIED. 110-130V/750W STRIED. 220-240V/800W
Pracovná Frekvencia	50/60HZ
Rozmery	101*39*27 CM
Čistá hmotnosť	5,5 KG

●Obsah balenia

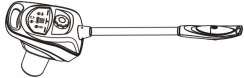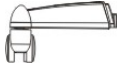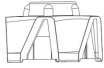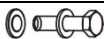Položka	Opis produktu	MNOŽSTVO
Hostiteľský prístroj		1 SÚPRAVA
Stĺpik		1 KUS
Pätňozličkový Stojan		5 KUSOV
Pätňozličková Základňa		1KUS
Pätňozličkový tanierový kryt		1KUS
Skrutky M10		1 SADA


KLÚČ		1 KUS
Bavlna na esenciu		3 KUSY
upevňovací rukáv		1 KUS
Používateľská príručka		1 SÚPRAVA

●Popis Štruktúry Naparovača

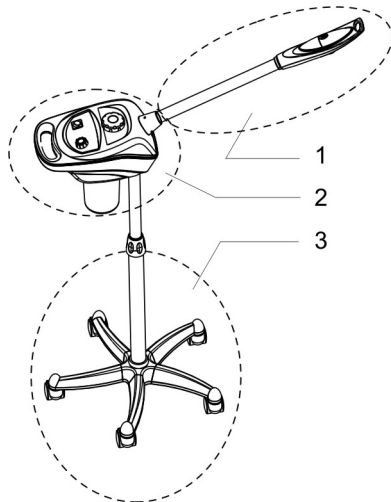


1. Sada rozprašovacieho ramena
2. Hostiteľský prístroj
3. Stojan

●Sada Rozprašovacieho Ramena

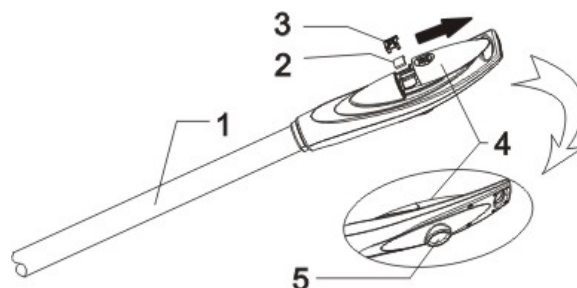


1. Rozprašovacie rameno
2. Bavlna pre olej esencie
3. Základňa esenciálneho oleja
4. Posuvný kryt esencie
5. Vývod pary

●Popis hostiteľského prístroja

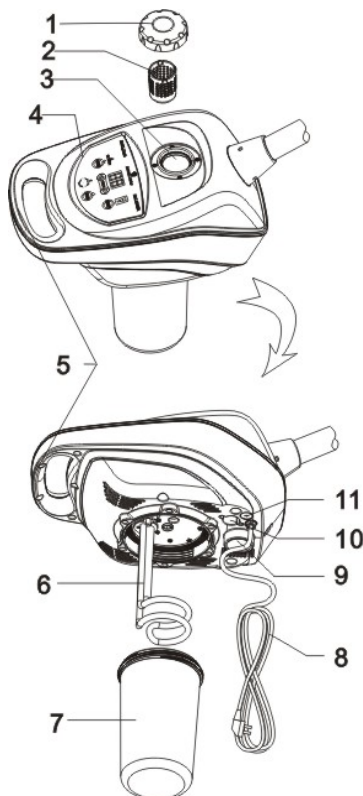

1. Kryt byliniek
2. Sieťka byliniek
3. Atomizačná komora
4. Ovládací panel
5. Rukoväť hostiteľa
6. Ohrievacia trubica
7. Pohár na vodu
8. Napájací kábel
9. Otvor na osadenie stĺpika
10. Štartér
11. Poistková základňa

●Popis stojana

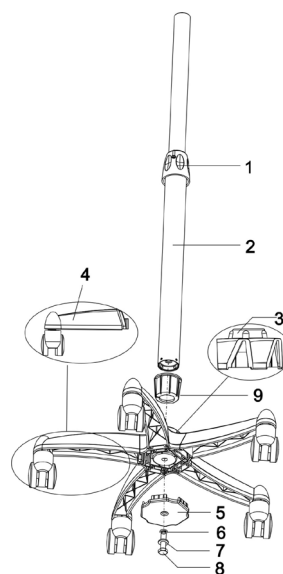

1. Skrutka na osadenie stĺpika
2. Stĺpik
3. Päťnožičková Základňa
4. Päťnožičkový Stojan
5. Päťnožičkový tanierový kryt
6. Laminovanie pružiny Ø10
7. Ø10 Plochá vymedzovacia podložka
8. Skrutka M10
9. Upevňovací rukáv

●Pokyny k montáži


Krok 1: Zatlačte kryt piatich nôh na základňu piatich nôh

Krok 2, 3: Nasadíte stĺpik spolu s upevňovacím puzdrom na základňu piatich nôh;

Upevníte tanierový kryt piatich nôh na päť nôh;


Položíte plochú podložku a lamináciu pružiny na skrutky M10 a potom upevníte tanierový kryt piatich nôh a päť nôh do stĺpika pomocou skrutiek M10.

Krok 4: Dajte hostiteľský prístroj na stĺpik

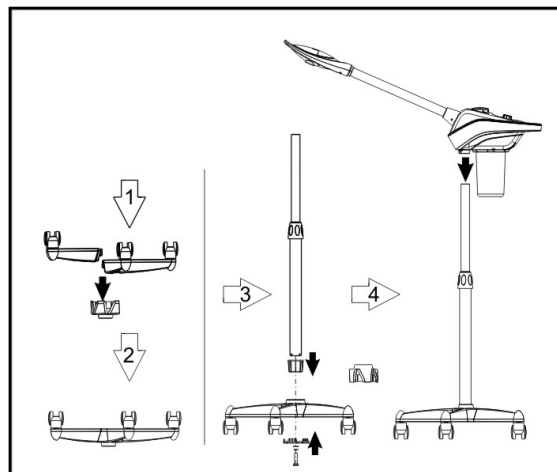

•Popis panela

>H1101 Mikropočítačom riadený Iónový Naparovač Tváre s Rastlinnou Aromaterapiou

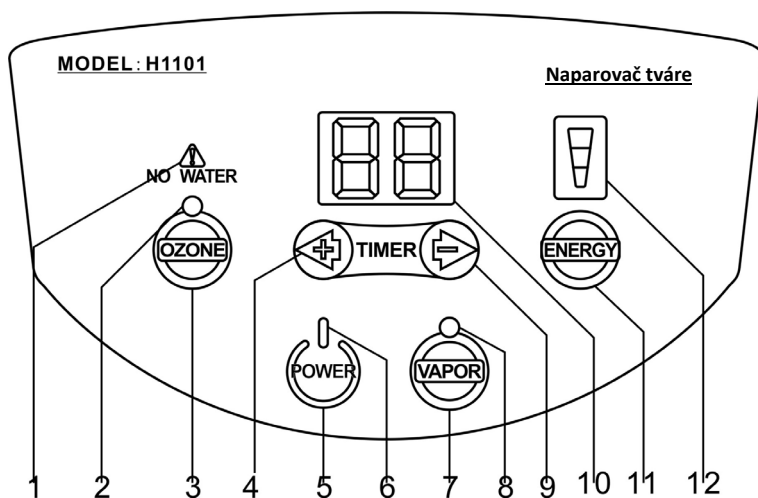


1. Indikačné Výstražné Svetlo pre Vysokú / Nízku Hladinu Vody
2. Indikačné Svetlo Činnosti Ozónu
3. Vypínač Ozónu
4. Tlačidlo Zvýšenia Času
5. Hlavný Vypínač
6. Indikačné Svetlo Napájania
7. Tlačidlo Zapnutia Horúcej Pary
8. Indikačné Svetlo Činnosti Horúcej Pary
9. Tlačidlo Zníženia Času
10. Okno Zobrazenia Času
11. Tlačidlo Výberu Energie
12. Okno Zobrazenia Energie

•Návod na použitie


1. Do pohára nalejte vodu

Keď ste otvorili kryt bylinného lieku, nalejte do pohára vodu. Hladina vody by mala byť medzi najvyššou a najnižšou značkou vody (ako je zobrazené na obrázku)

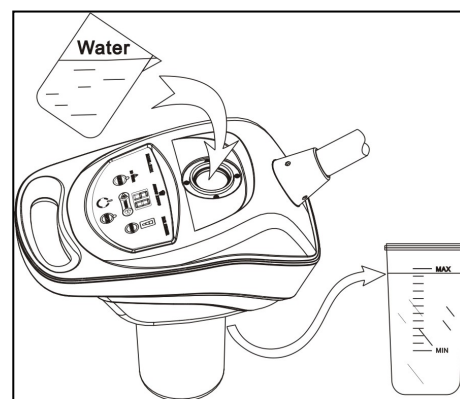


2. Pridanie čínskej bylinnej medicíny

Ak je potrebné bylinné rozprašovacie ošetrovanie, vezmite sieťku bylinného lieku z bylinného krytu, po vložení bylinného lieku do sieťky, ho potom vložte späť do bylinného krytu, potom naskrutkujte bylinný kryt do otvoru na vodu (ako je zobrazené na obrázku).

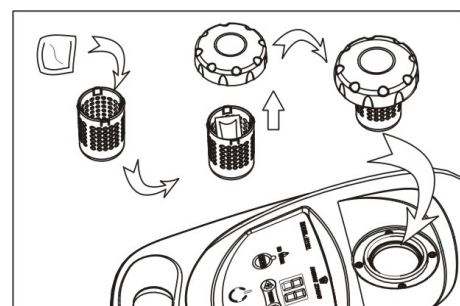


3. Pridanie esenciálneho oleja

Ak je potrebná rozprašovacia terapia esenciálnym olejom, otvorte posuvný kryt esenciálneho oleja na hornej strane dýzy a použite byretu na nakvapkanie esenciálneho oleja do bavlnenej palety (postačí jedna alebo dve kvapky esenciálneho oleja). (Ako je zobrazené na obrázku vpravo).

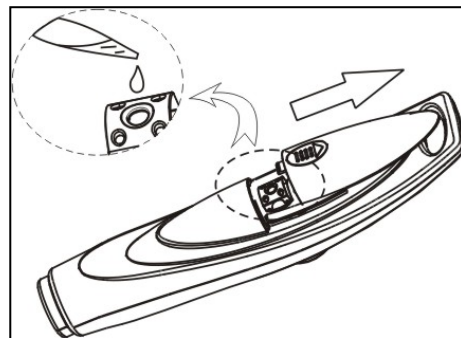

4. Inštalácia a odstránenie pohára na vodu

- Pred odstránením pohára na vodu odpojte napájanie
- Zatlačte kryt bylinného lieku v jednej ruke, a otočte v smere hodinových ručičiek podržaním dna pohára v druhej ruke.
- Naopak, odpojte napájanie pred inštaláciou pohára na vodu, stlačte kryt bylinného lieku v jednej ruke a otočte proti smeru hodinových ručičiek, podržaním spodnej časti pohára v druhej ruke. (Ako je zobrazené na obrázku)

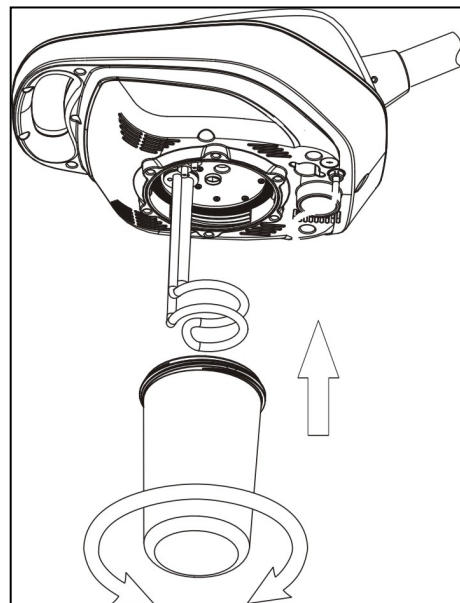

>Prevádzka ovládacieho panela Naparovača Azzurro H1101 Sonia riadeného mikropočítačom:

1. Zapojte sieťovú zástrčku

2. “” Indikátor napájania v tlačidle napájania svieti “” po zapnutí napájacieho tlačidla “”, motor prejde do pohotovostného režimu.

—Okno s časom zobrazuje “15”minút.

— “” v okne s energiou sa zobraz najvyšší stupeň.

—Indikátor pracovného stavu ozónu “” na vypínač ozónu “” je vypnutý.

—Indikátor pracovného stavu rozprašovača “” na “” je vypnutý.

3. Zapnite tlačidlo horúceho rozprašovania “”

Zapnite tlačidlo rozprašovača, indikačné svetlo stavu činnosti rozprašovača “” sa rozsvieti na “”.
V tomto okamihu, hosťiteľ začína ohrievanie, para je vypúšťaná z trysky asi šesť minút.

4. Nastavenie času

Nastavenie času: zatlačte tlačidlo  a  pre ČASOVAČ" pre nastavenie pracovného času v rozsahu 1~30 min.

5. Nastavenie energie:

Nastavenie energie: Zatlačte  ak chcete vybrať výstup pre opar, na výber je vysoký, stredný a slabý opar;  plné rozsvietenie okna displeja znamená najvyššiu energiu, naopak znamená najnižšiu energiu. Pred použitím oparu by ste mali zvoliť najvyššiu úroveň, potom upravte opar podľa potreby.

6. Zapnite funkciu ozónu.

Zatlačte vypínač ozónu , indikačné svetlo stavu činnosti ozónu  svieti; Ozónové potrubie sa teraz zapne, ozón zrejme vonia v pare s odlišným atomizačným fenoménom.

7. Výstražný systém hladiny vody

Počas zahrievania systém automaticky kontroluje hladinu vody. Ak je hladina vody v normálnom stave (medzi maximálnou a minimálnou hladinou vody), hostiteľské zariadenie bude pokračovať v ohreve; Keď hostiteľské zariadenie zistí príliš vysokú alebo príliš nízku hladinu vody (v okienku času sa zobrazí „E2“, ak je hladina vody príliš vysoká, v okienku času sa zobrazí „E1“), hostiteľské zariadenie sa automaticky prestane ohrievať a počas prevádzky sa rozsvieti kontrolka stavu striekania  na  je vypnuté, a bzučiak spustí alarm „Dí Dí“, kontrolka alarmu vody bude neustále blikať a všetky tlačidlá sa zablokujú, kým sa hladina vody nevráti do normálu. Potom môžete reštartovať tlačidlo napájania  aby sa zariadenie opäť spustilo.

●Pozor:

1. Pred zapnutím napájania hostiteľského prístroja, sa uistite, že pohár na vodu je zaskrutkovaný, hladina vody je medzi najvyššou a najnižšou značkou úrovne vody a kryt bylinného lieku je zakrytý v otvore na vodu.
2. Ak je potrebné pridať esenciálny olej v stave činnosti, doplňte ho až po pozastavení rozprašovania oparu.
3. Ak je potrebné pridať balík s bylinným liekom počas rozprašovania, musí sa zastaviť rozprašovanie oparu na jednu minútu na otvorenie krytu bylinného lieku. Kryt bylinného lieku, prosím, otvorte jednu minútu po zastavení rozprašovania.
4. Paleta z bavlny musí byť čistená v esenciálnej olejovej báze a balenie bylinného lieku v sieťke s bylinným liekom, keď prestanete používať aromaterapiu alebo bylinný sprej každý deň.
5. Musíte počkať, kým nebude para vystupovať z rozprašovacieho otvoru rovnomerne a dobre proporcionálne pred striekaním na tvár.
6. Rozprašovací otvor je vzdialený 40 cm od tváre zákazníka a rozprašovať paru by sa malo od brady zákazníka na celú tvár proporcionálne, aby sa zabránilo obareniu tváre zákazníka rozprašovanou horúcou parou.
7. Ozón má sterilizačný účinok, ale tiež poškodzuje pokožku a ničí živiny bylinného oleja, takže je dôležité vybrať si vhodný čas na rôzne typy pleti pri použití.
8. Nie je dovolené odobrať pohár s vodou, keď skončíte používanie spreja, inak spôsobí obarenie. Počkajte, prosím, kým bude pohár s vodou studený, potom ho odoberte.
9. Je potrebné sa vyhnúť pridávaniu vody, inak to bude mať nie len zlé účinky na hostiteľský prístroj, ale môže tiež spôsobiť problém úniku elektriny

10. Ak sa vyskytnú problémy úniku vody a úniku plynu pod hostiteľským prístrojom alebo na kryte bylinného lieku, nezabudnite najprv vypnúť napájanie hostiteľského prístroja a potom skontrolujte, či pohár s vodou alebo kryt bylinného lieku sú dobre zmontované. Ak sa problémy nevyriešia, obráťte sa na miestnu agentúru pre ďalšie riešenie.
11. Mal by mať dobré uzemnenie pre sieťovú zástrčku hostiteľského prístroja.
12. Keď je prístroj H1102 v priebežnom pracovnom režime, ak je hladina vody pod najnižšou značkou bez pridania vody, systém ochrany teploty reaguje hneď, aby sa dočasne odpojilo napájanie. Teraz by ste mali včas pridať dostatočné množstvo vody, inak systém ochrany teploty opäť preruší napájanie a opäť až do zlyhania ohrievacieho systému. Hostiteľský prístroj sa vráti do normálneho pracovného stavu po pridaní vody po dobe 1-3 minút.
13. Pri prevádzke venujte pozornosť hladine pohára s vodou.

●Pozor!!

1. Je zakázané dávať masťný materiál do pohára s vodou alebo sieťky na bylinný liek; Môže to spôsobiť problém s rozprašovaním vody.
2. Je zakázané používať vodu z vodovodu alebo vodu s veľkými nečistotami. Odporúčame použiť čistenú vodu, destilovanú vodu alebo filtrovanú vodu, inak to spôsobí zlyhanie detekcie a falošné pozitíva.
3. Nie je dovolené rozprašovať z hornej časti tváre parným otvorom, inak môže spôsobiť obarenie.
4. Nie je dovolené odobrať kryt bylinného lieku a pohár s vodou, keď prístroj rozprašuje.
5. Nie je dovolené uviesť tento prístroj do prevádzky v prostredí príliš vlhkom, napríklad: kúpeľňa atď.
6. Nie je dovolené pracovať za silného slnečného svitu, inak to spôsobí mnoho druhov nestabilných podmienok.
7. Ak sa vyskytne nejaký výnimočný problém, obráťte sa prosím na agentúru, a nechajte opraviť prístroj profesionálnemu opravárovi namiesto otvorenia krytu hostiteľského prístroja na opravu Vami.
8. Ak sa napájací kábel zničí, je lepšie použiť originálne príslušenstvo. Nie je povolené prístroj opraviť neprofesionálnym personálom; mali by ste ohľadom výmeny navštíviť určenú opravovňu.

●Údržba

- Pred použitím každý deň vymeňte čistú vodu. Po dokončení prevádzky pohár s vodou dôkladne vyčistite, a zabráňte hromadeniu vody a vyhnite sa hromadeniu mastnoty a iných zvyškov.
- Raz za týždeň vyčistite vyhrievacie sady. (Tipy: na umývanie zmiešajte nejakú kyselinu octovú alebo kyselinu citrónovú s vodou do pohára na vodu, po zahriatí po dobu jednej minúty, potom čistou vodou umyte ohrievaciu trubicu.)
- Často venujte pozornosť hladine vody v pohári.
- Čistením prístroja po použití, sa vyhnete akumulácii kozmetických zvyškov.

Ak je obrázok v návode na použitie odlišný od aktuálneho produktu, návod je platný aj pre aktuálny produkt. Naša spoločnosť si ponecháva právo na vylepšenia, prepáčať prosím, ak o zlepšení nebudeme informovať, v prípade, že nemá vplyv na normálne použitie.