

Kozmetický ozonizér a ultrazvuk Elegante 872 manuál

ČASŤ ULTRAZVUKOVÁ MASÁŽ:

1. Funkcia:

Bol vynájdený v 80. rokoch pre oblasť kozmetiky. Dokáže vyliečiť množstvo kožných problémov a urýchliť hojenie problematickej pokožky. Má jednoduché ovládanie, ktoré uvíta väčšina profesionálov v oblasti kozmetiky a je to pre nich tiež skvelá investícia, má 3 hlavné funkcie:

1. Aspekt mechanizmu
Dokáže zmäkčiť kožné tkanivo, urýchliť vstrebávanie kožných produktov, zvýšiť telesný metabolizmus a krvný obeh, jemne stimulovať nervový systém a bunky atď.
2. Tepelný aspekt
Môže urýchliť metabolizmus tela a krvný obeh. Upokojuje nervové tkanivo a pomáha zbaviť sa bolesti.
3. Chemický aspekt
Dokáže urýchliť metabolizmus pokožky. Vyrovnáva hodnotu Ph kožného tkaniva. Pomáha pokožke absorbovať ošetrojúce produkty a zintenzívňuje sterilizáciu.

2. Funkcia Terapie a skrášľovanie:

1. Na uľahčenie prenikania ošetrojúceho produktu cez pokožku s nasledujúcou konkrétnou funkciou:
 1. Neobmedzuje sa na kvalitu ošetrovacích produktov, či už ide o iónové (+/- molekuly), vo vode rozpustné alebo liečivé.
 2. Je to účinnejšie ako vtieranie ošetrojúcich produktov do pokožky, pretože pomáha pokožke absorbovať ošetrojúce produkty.
 3. Neobmedzené iónmi (+/- molekulami) produktov.
 4. Ošetrované oblasti môžu po ošetrení zostať nehybné.
 5. Nespôsobí elektrický šok
 6. Ľahko sa s ním narába a ošetrojúce produkty ľahko priľnú k pokožke.
2. Skrášľovanie
 1. Zjemňuje krvnú žilu a vyrovnáva sčervenanie tváre.
 2. Zbavuje pupienkov a akné (každých desať dní sa podáva ako dávka)
 3. Odstraňuje pigmentáciu kože. Používajte s pleťovými produktmi s vysokým obsahom vitamínu C na urýchlenie procesu omladenia pleti. Očakávajte výsledok po 3 ošetreniach s optimálnym výsledkom po 10-40 ošetreniach.
 4. Predchádza a zabraňuje tvorbe vrások, zjemňuje krvné žily a lifting tváre. Vzhľadom na zvýšenie rýchlosti metabolizmu v tele každodenne pomáha zbaviť sa uvedeného problému.
 5. Odstraňuje očné vaky a tmavé kruhy Masírujte jemné oblasti očí, aby ste ich zbavili prebytočnej vody, opuchov a tmavých kruhov.

6. Na zmäkčenie kožného tkaniva masážou. Zanecháva pokožku žiarivú a jemnú.
7. Urýchľuje proces akéhokoľvek ošetrovania pleti a dosahuje optimálne výsledky.

3. Návod na použitie:

1. Pred ošetrením si tvár najskôr dobre očistite čistiacim pleťovým krémom.
2. Zmyte krém a potom napaľujte tvár 10 minút.
3. Čistí cez komedo na tvári.
4. Naneste zmršťovacia vodu na tvár a jemne ju poklepte a potom utrite.
5. Otestujte stav pokožky a potom naneste na tvár vhodný liečivý krém.
6. Zapnite prístroj a potom nastavte výkon sondy podľa typu pokožky.
7. Nastavte časovač tak, aby ukazoval 15 minút normálneho pracovného času.
8. Stlačte tlačidlo pre výber typu tvaru vlny.
9. Masírujte pokožku pokrytú liečivým krémom pomocou sondy.
10. Po ukončení ošetrovania vypnite stroj a vyčistite špinavú sondu.
11. Ak použijete prístroj s púdom na masku z tradičnej čínskej medicíny, bude to mať lepší účinok.

4. Pozor:

1. Elektrické napájanie je 240V/220V/110V
2. Pred ošetrením si najprv očistite tvár (alebo poranenú oblasť).
3. Použitý liečivý krém by mal byť slizký, aby sa do pokožky lepšie vstrelal a zároveň aby nedošlo k spáleniu sondy.
4. Prevádzková doba je nastavená na 15 minút a za normálnych podmienok to stačí.
5. Nepribližujte sondu do blízkosti očí ani sa ich nedotýkajte, aby nedošlo k poraneniu.
6. Nenechávajte sondu v činnosti, ani s ňou nemanipulujte, aby sa dotýkala pokožky, pretože je ľahké ju spáliť pri prehriatí.

5. Špecifikácia kozmetického prístroja:

1. Elektrické napätie je 1,00 MHz, 1 MHz (s časovačom)
2. Čas prevádzky: 1-30 minút (nastaviteľné)
3. Intenzita má 10 úrovní. Zelená-3, žltá-3, červená-4.
4. Rozsah výstupného výkonu: 0-10W, nastaviteľný.
5. Frekvencia pulzu je 4 Hz.
6. Rozsah vstupného napájania:: 110V/220/240V (s nastaviteľným zapnutím/vypnutím) 50-60Hz.
7. Vstupný príkon: rovný alebo menší ako 40W.

ČASŤ VYSOKOFREKVENČNÁ ELEKTROTHERAPIA:

1. Funkcia:

1. Na ošetrovanie pokožky použite špeciálnu intenzitu ultrafialových lúčov, ktoré sterilizujú pokožku a urýchľujú hojenie rán.
2. Na odstránenie škvŕn, pigmentácie, vyrážok a akné

2. Návod na použitie:

1. Vložte ozónovú elektródu do rukoväte a dobre ju držte.
2. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky a potom zapnite prístroj.

- Otočením tlačidla na páke energie vyberte vhodnú úroveň podľa stavu a typu pokožky a potom začnite pracovať.
- Po ukončení ošetrovania otočte tlačidlo na páke energie do polohy „O“ a vypnite napájanie, vytiahnite elektródu a dobre vyčistite a vysušte úložisko.

3. Pozor:

- Pred ošetrením si zložte všetky kovové šperky (náušnice, náhrdelník atď.)
- Počas ošetrovania nezostávajúce príliš dlho na ošetrovanej oblasti, aby ste zabránili vzniku jaziev.
- Po ukončení ošetrovania by sa mali použité elektródy vyčistiť a uskladniť v suchu.

• **ŠPECIFIKÁCIA**

Napätie	Výkon	Hz.	Teplota	Celková hmotnosť	Rozmery:
240/220/110V	30W	50/60HZ	5-40°C	3.2kg	34*34*21 cm