



Brand for Beauty

Distribútor:

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 Dunajská Streda

Kontakt:

www.fabulo.sk, info@fabulo.sk, 0948/223-550

Návod na použitie

Model: HY-D018

HY-D018

Presoterapia a lymfodrenáž

I. Zhrnutie

Tento kozmetický prístroj, ktorý spája v sebe zoštíhľujúcu kúru, dekompresiu a detoxikáciu, je nevyhnutným vybavením moderných kozmetických salónov. Je vylepšením staršej terapie so 7 návlakmi a jednobodovým ošetrením.


Skladá sa z 5 častí a obsahuje spolu 18 návlakov, rovnomerne rozložené pre pravú a ľavú časť tela: 1 návlak na driek, 1 návlak na oblasť brucha, horné a dolné končatiny.

II. Funkcie


1. detoxikácia
2. tvarovanie postavy
3. zoštíhlenie
4. hĺbková lymfodrenáž
5. dekompresia a relaxácia tela
6. redukcia výskytu celulitídy

Pacienti používajúci tento prístroj sa cítia uvoľnenie, sú štíhlejší, pretože prístroj im pomáha tvarovať postavu a ženám mať sexi krivku v tvare S. Pravidelné pôsobenie tlaku vzduchu podporuje močenie, vyprázdnenie, zlepšuje krvný a lymfatický obeh, odstraňuje škodlivé látky z tela i znižuje tvorbu melanínu a škvŕn na pokožke.

III. Diagram panela

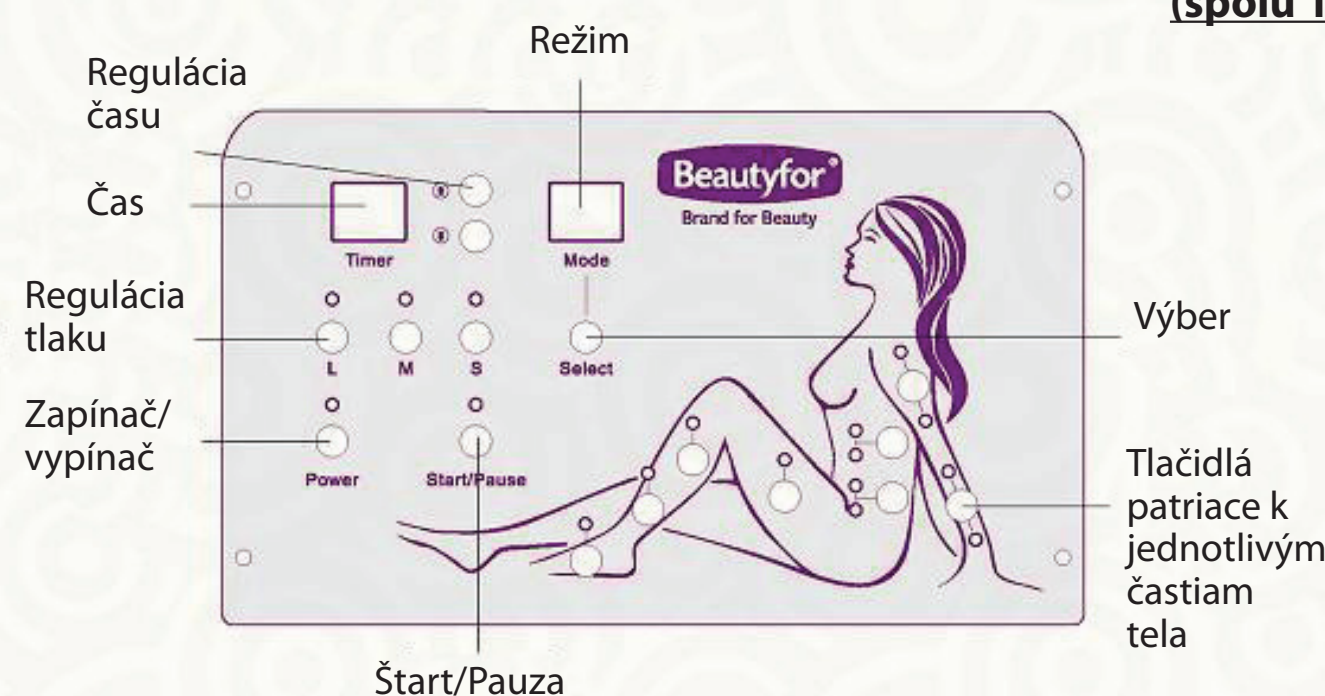


IV. Mapa rozdelenia návlakov (spolu 18 kusov):

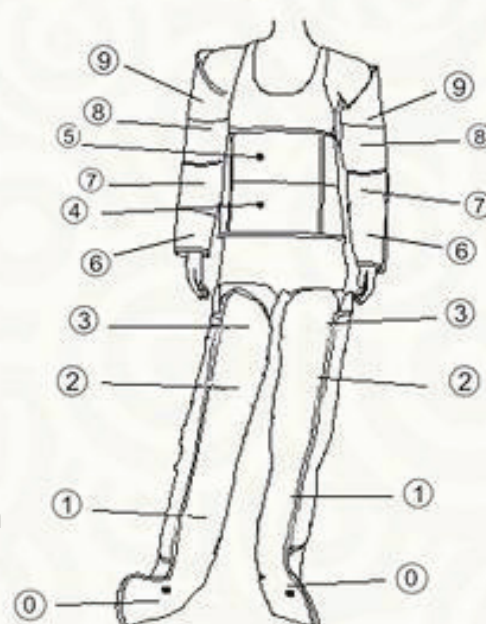

V. Návod

1. Pripojte prístroj do elektrického napätia (220 V) a stlačte tlačidlo "Zapínač/vypínač".
2. Displeje „režim“ a „čas“ sa rozsvietia a zobrazí sa na nich stav ovládača a prednastavený čas (spravidla 30 minút). Pacient môže regulovať čas pomocou tlačidla „regulácia času“.
3. Existujú 2 pracovné režimy: „automatický režim“ a „manuálne nastavený režim“.
- 1) Automatický režim (prednastavený): Na prístroji je prednastavený automatický režim so 6 možnosťami. Stlačte tlačidlo „Výber“ pre výber z možností 1 až 6. Nasledujúci diagram ukazuje, ako sa návlaky trasú od nôh až k oblasti brucha.
- 2) Manuálne nastavený režim: Po 6 automatických možnostiach prístroj prepne do manuálne nastaveného režimu. Teraz si môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo patriace k

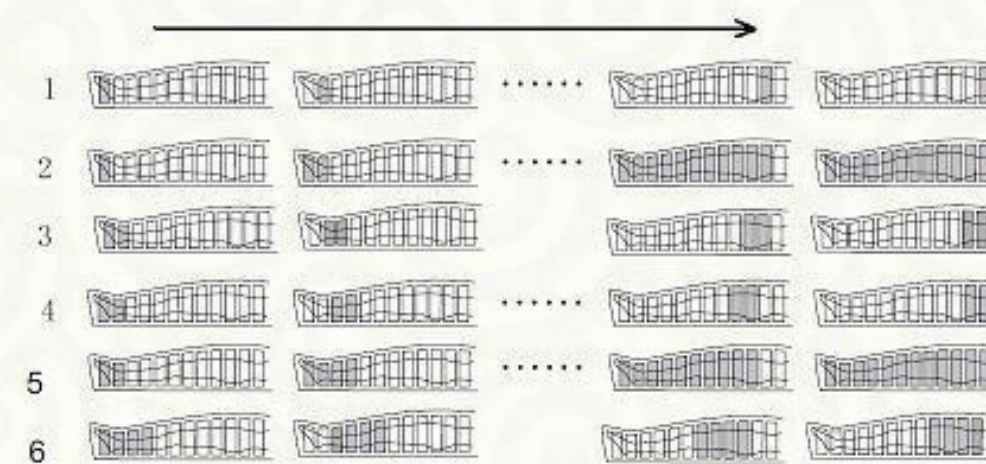

jednotlivým častiam tela, t.j. ak si tlačíte tlačidlo spojené s rukou, návlak patriaci k tejto oblasti tela bude pracovať. Samozrejme, je tu možnosť viacerého výberu. Môžete si naraz spustiť návlaky na nohy a ruky alebo všetky návlaky stlačením všetkých tlačidiel.

4. Regulácia tlaku je možné pomocou nasledujúcich tlačidiel: L (veľké), M (stredné), S (malé).
5. Po nastavení vyššie uvedených 4 funkcií stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a prístroj začne pracovať podľa nastavenia. Ak chcete prístroj zastaviť, znovu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“.

VI. Časovač

- Možnosť 1** – Nadváha – vyberte si možnosť 1 automatického režimu, odporúčaný čas terapie je 60 minút
- Možnosť 2** – Mierna nadváha – vyberte si možnosť 1 a 3 automatického režimu, odporúčaný čas terapie je 30-45 minút
- Možnosť 3** – Malá nadváha – vyberte si možnosť 1 automatického režimu na 20 minút, a potom si vyberte manuálne nastavený režim na 15 minút
- Možnosť 4** – udržanie štihlej postavy – vyberte si ktorúkoľvek možnosť automatického režimu, od 1 do 6 na 20-30 minút (vyberte si jednu možnosť alebo viacero možností striedavo)
- Možnosť 5** – hĺbková lymfodrenáž – vyberte si možnosť 3 automatického režimu na 20-35 minút

VII. Prístroj je vhodný pre pacientov, ktorí:

1. chcú schudnúť (môžu schudnúť, ale pomocou len tohto prístroja iba málo)
2. chcú si udržať štíhlu postavu po pôrode
3. majú zápchu alebo zhoršený lymfatický obeh, spravidla trpiaci vyrážkami a rôznymi škvŕnami
4. ženy, ktoré by chceli mať sexi postavu a krivky

VII. Pacienti v prípade nasledujúcich ochorení nesmú používať tento prístroj:

1. nákazlivé choroby
2. akútne ochorenia
3. ochorenia srdca
4. vysoký krvný tlak, mozgová príhoda alebo iné vážne prípady
5. krvácanie alebo nehoda
6. ženy počas menštruácie nesmú používať v oblasti brucha
7. tehotné ženy

VIII. Technické údaje

Elektrické napätie: 220 V
Výkon: 60 W

Sieťová frekvencia: 50 Hz
Menovitý prúd: 0,5 A

