



SK

Návod na použitie

**Pevný masážny stôl - séria
Fabulo Spa Deluxe Comfort**



Výhradný distribútor značky Fabulo:

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Web: www.fabulo.sk, E-mail: info@fabulo.sk

Tel. SK: 0948 223 550, Tel. CZ: 728 241 469

Ďakujeme za kúpu nášho vysoko kvalitného pevného masážneho stola!
Naša firma sa usilujeme o neustálu modernizáciu a vývoj produktov aj na základe spätných väzieb od zákazníkov. Cieľom prísneho a starostlivého výberu materiálov a ich kvalitného spracovania, ako aj kvalitného popredajného servisu a konkurencieschopnej ceny je, aby sa naši zákazníci cítili výnimočne pohodlne.

Dôležité upozornenia



Nesprávne používanie produktu môže viesť k zraneniu.
Pred použitím si prečítajte všetky inštrukcie.



Skontrolujte výplň a čalúnenie počas rozbaľovania. Stôl nepoužívajte, ak sú viditeľné znaky poškodenia. (Naša záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym poskladaním, nehodami alebo nesprávnym používaním produktu.)



Maximálna záťaž (vrátane klienta a príslušenstva):
Maximálna pracovná záťaž: 273 kg
Statická záťaž: 1815 kg



Aby nedošlo k zraneniu, predtým ako si klient ľahne na stôl, uistite sa, že produkt je správne poskladaný a je na rovnej podlahe.



Na premiestnenie alebo otočenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.



Nepokladajte nadmernú záťaž na opierku hlavy alebo časti slúžiace na predĺženie stola. Nevystavujte stôl extrémnej vlhkosti alebo teplote.



Pevný masážny stôl nie je žiadna hračka.
Masážny stôl držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Pozor: Chemikálie a dezinfekčné prostriedky môžu poškodiť čalúnenie.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené chemikáliami a/alebo dezinfekčnými prostriedkami.

Návod na montáž

Zloženie masážneho stola

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a náradie uvedené na zozname.

Diely a náradia:

A: 1/4,, 85 mm skrutka

B: 3/8,, 75 mm skrutka

C: 1/4,, 42 mm skrutka


D: vidlicový kľúč #14

E: imbusový kľúč

F: zaistovacie skrutky

G: podložka

H: 3/8,, 75 mm matica

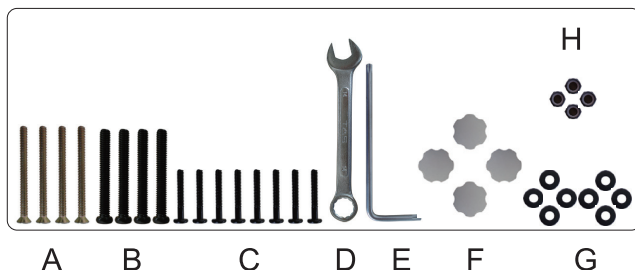


Krok 1: Stôl položte na rovnú podlahu hore dnom.

(Obr. 1)







Deti by nemali byť prítomné počas skladania stola. Ostré predmety by nemali byť v blízkosti čalúnenia, aby sa predišlo poškodeniu.

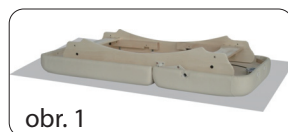



Krok 2: Rozložte nohy a pripevnite ich čiernymi skrutkami (B) v každom rohu pomocou pribalených kľúčov (D a E). (Obr. 2, 3)

Krok 3: Zaskrutkujte 1/4,, 85 mm skrutky (A) do každej nohy a pritiahnite ich. (Obr. 4)

Krok 4: Poličku položte do otvorov a pripevnite ich skrutkami (C) v každom rohu pomocou kľúča (E). (Obr. 5, 6)

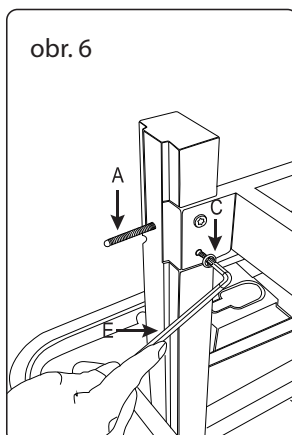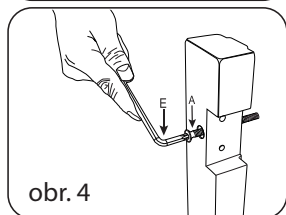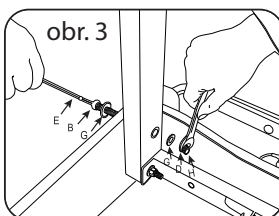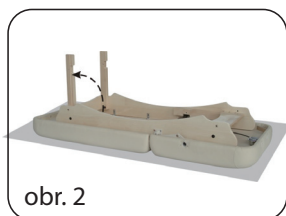

Krok 5: Pripevnite diely slúžiace na predĺženie nôh v požadovanej výške pomocou zaistovacích skrutiek (F). (Obr. 7, 8)

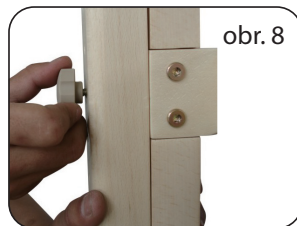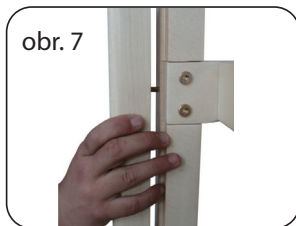

Krok 6: Skontrolujte montáž a otočte stôl.

Skontrolujte hore uvedené kroky a uistite sa, že všetky skrutky, matice a podložky sú správne použité a pritiahnite ich ešte raz.

Pri premiestnení alebo otočení uchopte stôl za drevený rám a nie za čalúnenie. (Obr. 9)



Pred otočením stola sa uistite, že opierka chrbta a opierka nôh sú v najnižšej pozícii a pevne zapadnuté do seba.

Na premiestnenie či otočenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.

Správny spôsob otočenia stola



Návod na použitie



Nesadajte si na zvýšenú opierku chrbta alebo opierku nôh.

1. Upravenie výšky opierky chrbta

Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavené polohovateľnou opierkou chrbta riadenou plynovou pumpou. Ovládacie spínače sa nachádzajú na konci stola.


Opierku chrbta zvýšte stlačením ovládacieho spínača a tlačením opierky chrbta smerom hore do požadovanej výšky pri konci stola slúžiacej na položenie hlavy. Ak je opierka v požadovanej pozícii, pustíte ovládací spínač. (Obr. 10, 11, 12)




Počas upravovania výšky stola pomôže, ak sa klient predkloní.



obr. 10

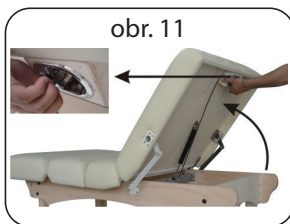


obr. 11

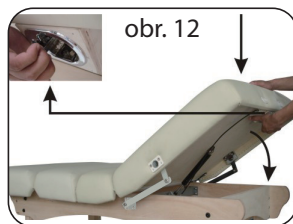

obr. 12

2. Upravenie výšky opierky nôh

Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavené polohovateľnou opierkou nôh riadenou plynovou pumpou. Ovládacie spínače sa nachádzajú na konci stola. Stlačte ovládací spínač a zvýšte opierku nohy jej tlačeníím smerom hore na jej nižšom strednom konci do požadovanej výšky (Obr. 13). Stlačte ovládací spínač a znížte opierku jej tlačeníím smerom dole na vyššom strednom konci do požadovanej výšky. Pustíte ovládací spínač a opierka zostane na mieste (Obr. 14).

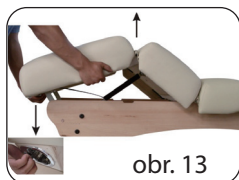

obr. 13



obr. 14

3. Výmena plynovej pumpy

Ak opierku chrbta alebo opierku nôh neviete nastaviť do požadovanej pozície, lebo plynová pumpa je nefunkčná, vymeňte ju podľa nasledujúcich krokov:

Umiestnite U-koniec plynovej pumpy do zárezu v strednej časti kovového nosníka – vid' obrázok. (Obr. 15)

Umiestnite kovovú skrutku do otvoru a presuňte ju cez U-koniec plynového tlmča a nosníka. (Obr. 16)

Pritiahnite skrutku pomocou svorníka. (Obr. 17)

Riadne utiahnite skrutku, aby ste sa uistili, že tlačidlo na pneumatickej tyči je riadne pripevnené na páku a káble netrčia von.



obr. 15



obr. 16



obr. 17



obr. 18

4. Pripevnenie/odstránenie rovnej opierky rúk


Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavné rovnou opierkou rúk, ktorá je odstnímateľná, aby v prípade potreby mal masér pohodlnejší prístup ku klientovi a aby si klient mohol jednoduchšie a bezpečnejšie nasadnúť alebo zosadnúť zo stola. (Obr. 19) Zdvihnite opierku do 30 stupňového uhla a zatlačte ju, kým kovová tyč celkom nezapadne do nylonového otvoru na vrchu stola, potom ju otočte dole, kým nebude v rovnej pozícii. (Obr. 20, 21) Zdvihnite opierku do správneho uhla a vytiahnite ju.



obr. 19



obr. 20

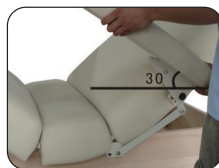

obr. 21

5. Pripevnenie/odstránenie flexibilnej opierky ruky

Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavné flexibilnou opierkou rúk. Ohnite flexibilnú opierku obidvoma rukami, aby kovové tyče zapadli do nylonového otvoru na boku vrchnej strany stola a zatlačte opierku, kým kovové tyče celkom nezapadnú do nylonových otvorov na bočnej strane stola. (Obr. 22)

Ohnite flexibilnú opierku obidvoma rukami a vytiahnite ju. (Obr. 23)


Otočte koliesko pre nastavenie tesnoty opierky. (Obr. 24)



obr. 22



obr. 23

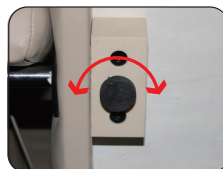

obr. 24



POZOR

Nesadajte na opierky rúk.

Nepokladajte nadmernú záťaž na opierky rúk.

6. Polohovateľná U-opierka hlavy

Zasuňte tyče U-opierky hlavy do otvorov na konci stola. (Obr. 25)

Umiestnite nastavovaciu páku tak, aby vyčnievala vodorovne, hranou smerujúcej hore. (Obr. 26)

Nastavte U-opierku hlavy do požadovanej pozície a nastavovaciu páku stlačte dole pre zaistenie opierky v pozícii. (Obr. 27)

Pre odstránenie U-opierky hlavy uvoľnite páku a opierku vytiahnite z otvorov.



obr. 25



obr. 26



obr. 27



obr. 28



obr. 29

7. Opierka rúk / Popruh

1. Tyče U-opierky hlavy presuňte cez slučky opierky či popruhu. (Obr. 30)
2. Tyče U-opierky hlavy vložte do otvorov na konci stola a suchým zipsom pripevnite na vrchnú časť U-opierky. (Obr. 31)
3. Položte vankúš na opierku. (Obr. 32)



obr. 30



obr. 31



obr. 32

8. Vankúšik

1. Tyče obdĺnikovej opierky hlavy presuňte cez slučky vankúšika. (Obr. 33)
2. Tyče obdĺnikovej opierky hlavy vložte do otvorov na konci stola.
3. Umiestnite vankúšik do požadovanej pozície nastavením slučiek pomocou suchého zipsu. (Obr. 34)



obr. 33



obr. 34

9. Starostlivosť o čalúnenie

S cieľom chrániť kvalitu výrobkov a predĺžiť ich životnosť sme testovali niekoľko preventívnych krokov vzťahujúcich sa na čalúnenie a príslušenstvo:

- Neskladujte stôl pri extrémne nízkych teplotách, pretože chlad môže spôsobiť popraskanie čalúnenia.
- Neskladujte stôl pri extrémne vysokých teplotách, pretože sa čalúnenie môže roztiahnuť a pokrčiť.
- Stôl nepoužívajte v blízkosti ohrievačov, elektronických zariadení, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Stôl nenechávajte vo vnútri vozidla počas horúčav a mrazov.
- Stôl a príslušenstvo chráňte prikrývkou.
- Poťah čistite každý deň. Použite jemný čistiaci prostriedok, aby ste ho ochránili pred olejovými škvrnami a nečistotou, ktoré môžu viesť k prasknutiu alebo trvalým škvrnám.
- Zmiešajte malé množstvo antibakteriálneho mydla s vodou v rozprašovači, nastriekajte na povrch stola a utrite stôl čistou handrou.
- Používajte obidva konce stola. Z času na čas opierku hlavy premiestnite z jedného

- konca stola na druhý, aby nedochádzalo k nerovnomernému opotrebovaniu.
- Chráňte stôl pred odreninami, rezmi a prepichnutím.



Lieh vysušuje vinyl a spôsobuje prasknutie.

Dlhodobé vystavenie stola extrémnym teplotám môže poškodiť vinyl.

10. Bezpečnostné opatrenia

Kontrolujte všetky spoje ročne.

Okamžite nás kontaktujte, ak sa objavia znaky opotrebovania majúce vplyv na bezpečnosť.

Neoprávnená úprava alebo zmena produktu je zakázaná.

11. Záruka

1. 3-ročná záruka na konštrukciu stola a príslušenstvo.

2. 2-ročná záruka na výplň a čalúnenie.

Všetky záruky sú obmedzené na výmenu dielov a opravu vykonané výrobcom.

Všetky záruky sú uvedené vyššie a sú výhradné. Neexistuje žiadna ďalšia záruka, výslovná ani predpokladaná.