



SK

Návod na použitie

Pevný masážny stôl - séria Fabulo Spa Lux



Výhradný distribútor značky Fabulo:

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Web: www.fabulo.sk, E-mail: info@fabulo.sk

Tel. SK: 0948 223 550, Tel. CZ: 728 241 469

Ďakujeme za kúpu nášho produktu! Usilujeme sa o modernizáciu a vývoj našich produktov spĺňajúce požiadavky našich zákazníkov, o prísny a starostlivý výber materiálov a ich kvalitné spracovanie, ako aj o kvalitný popredajný servis a konkurencieschopné ceny. Naším cieľom je, aby naši zákazníci pocítili dotyk života pomocou našich masážnych stolov.

Dôležité upozornenia



Nesprávne používanie produktu môže viesť k zraneniu.
Pred použitím si prečítajte všetky prevádzkové pokyny a návody týkajúce sa údržby



NEPOUŽÍVAJTE STÔL, KEĎ NIE JE SPRÁVNE POSKLADANÝ ALEBO MÁ VOLNÉ,
CHÝBAJÚCE, POŠKODENÉ A NESPRÁVNE NAINŠTALOVANÉ ČASTI.



Maximálna záťaž (vrátane klienta a príslušenstva): 250 kg



Skontrolujte výplň a čalúnenie počas rozbaľovania. Stôl nepoužívajte, ak sú viditeľné znaky poškodenia a okamžite nás kontaktujte. (Naša záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym poskladaním, nehodami, zneužitím alebo nesprávnym použitím výrobku.)



Než si klient ľahne na stôl, uistite sa, že stôl stojí rovno na podlahe. Klient môže stratiť rovnováhu a spadnúť.



Pri premiestnení alebo otočení stôl chyťte za drevený rám a nie za čalúnenie. Na otočenie alebo premiestnenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.



Nesadajte na zvýšenú opierku chrbta, opierku nôh alebo rúk.



Neukladajte nadmernú záťaž na opierku hlavy alebo časti slúžiace na predĺženie stola.



Nevystavujte stôl extrémnej vlhkosti alebo teplotám.




Masážny stôl držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Návod na montáž

Montáž masážneho stola

Pozor: Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a náradie uvedené na zozname. Balenie môže obsahovať aj diely navyše.

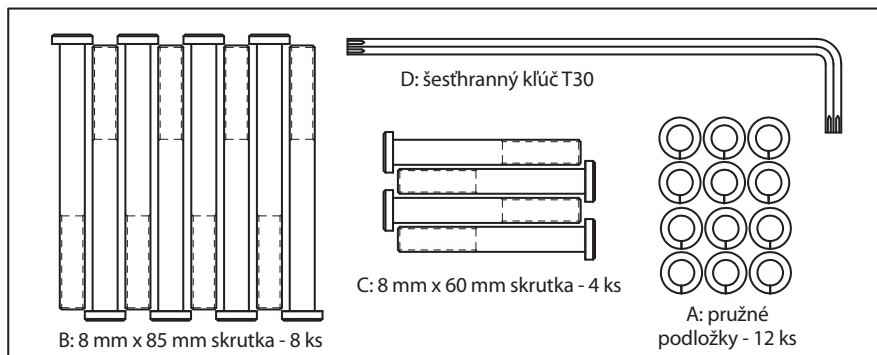

- A: pružné podložky - 12 ks
- B: 8 mm x 85 mm skrutka - 8 ks
- C: 8 mm x 60 mm skrutka - 4 ks
- D: šesthranný kľúč T30

Krok 1: Stôl položte na rovnú podlahu hore dnom. Uistite sa, že v blízkosti sa nenachádzajú žiadne ostré predmety.

Odporúčame dať mäkkú prikrývku pod stôl pre ochranu čalúnenia. (Obr. 1)

Krok 2: Pred montážou nôh sa uistite, že tvar každej nohy sa zhoduje s podložkami pod stolom. (Obr. 2)




obr. 1




obr. 2

Krok 3: Pripevnite nohy podľa Obr. 3. Do každého rohu idú dve skrutky.

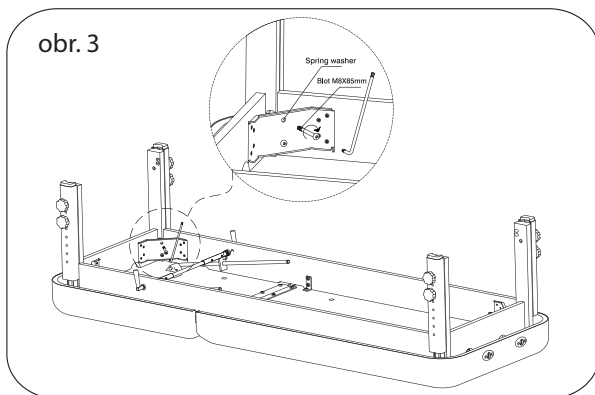

Krok 4: Poličku položte smerom ku koncu nôh a pripevnite ju jednou skrutkou v každom rohu. Uistite sa, že plochá strana nohy smeruje k vrchnej časti stola (Obr. 4).

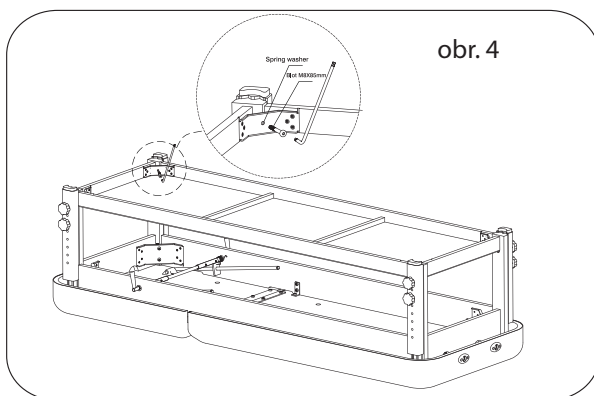

Krok 5: Otočte stôl a skontrolujte ho pred použitím.

Pozor: Deti by nemali byť prítomné počas skladania stola. Ostré predmety by nemali byť v blízkosti čalúnenia, aby sa predišlo poškodeniu.

Pozor: Pred použitím sa uistite, že všetky skrutky sú pritiažené.

Pozor: Než si klient sadne na stôl, uistite sa, že nohy stola a opierka chrbta zapadli do seba. Na premiestnenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.

Pozor: Skontrolujte, či sú všetky hore uvedené inštrukcie dodržané a všetky skrutky riadne pritiažené.

Návod na použitie

Upravenie výšky stola

Odskrutkujte zaistovacie skrutky, nastavte nohy stola do požadovanej výšky a následne obidve skrutky zaskrutkujte späť. Postup zopakujte na každej nohe.



Nastavenie opierky chrbta

Zvýšenie opierky chrbta:

Zvýšte opierku chrbta do požadovanej polohy jej nadvihnutím zo stola. Opierka chrbta automaticky zapadne do pozície. Pomôže, ak počas nastavenia výšky sa pacient predkloní (Obr. 7).

Zníženie opierky chrbta:

Opierku chrbta podopierajte jednou rukou, zatiaľ čo zatlačíte rukoväť. Pomaly znížte opierku chrbta do požadovanej výšky. Pomôže, ak sa klient počas nastavenia výšky predkloní (Obr. 8).



obr. 7



obr. 8

Starostlivosť o čalúnenie

S cieľom chrániť kvalitu výrobkov a predĺžiť ich životnosť sme testovali niekoľko preventívnych krokov vzťahujúcich sa na čalúnenie a príslušenstvo:

- Neskladujte stôl pri extrémne nízkych teplotách, pretože chlad môže spôsobiť popraskanie čalúnenia. Stôl nepoužívajte v blízkosti elektronických zariadení a nenechávajte ho vo vnútri vozidla v chladnom počasí.
- Neskladujte stôl pri extrémne vysokých teplotách, pretože sa čalúnenie môže rozťahovať a pokrčiť. Stôl nepoužívajte v blízkosti ohrievačov, elektronických zariadení, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a nenechávajte ho vo vnútri vozidla počas horúčav.
- Stôl a príslušenstvo chráňte prikrývkou.
- Poťah čistite po každom použití jemným čistiacim prostriedkom, aby ste ho ochránili

pred olejovými škvrnami a nečistotou. Nechránený potah môže prasknúť alebo sa na ňom môžu objaviť trvalé, viditeľné škvrny. Zmiešajte malé množstvo antibakteriálneho mydla s vodou v rozprašovači a čistou handrou utrite stôl.

- Používajte obidva konce stola. Z času na čas opierku hlavy premiestnite z jedného konca stola na druhý, aby nedochádzalo k nerovnomernému opotrebovaniu.
- Chráňte stôl pred odreninami, rezmi a prepichnutím, v jeho blízkosti nepoužívajte žiadne ostré predmety.

- Pozor:**
1. Čistý lieh vysušuje vinyl a spôsobuje prasknutie.
 2. Dlhodobé vystavenie stola extrémnym teplotám môže poškodiť vinyl.
 3. Používanie agresívnych dezinfekčných prostriedkov môže poškodiť čalúnenie.
 4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím.

Bezpečnostné opatrenia

Kontrolujte všetky spoje ročne.

Kontaktujte nás okamžite, ak sa objavia znaky opotrebovania majúce vplyv na bezpečnosť.

Neoprávnená úprava alebo zmena produktu je zakázaná.

Záruka

Na konštrukciu všetkých pevných masážnych stolov sa vzťahuje 3-ročná záruka, na výplň a čalúnenie 2-ročná záruka a na príslušenstvo 1-ročná záruka.

Všetky záruky sú obmedzené na výmenu dielov a opravu vykonané výrobcom.

Všetky záruky sú uvedené vyššie a sú výhradné. Neexistuje žiadna ďalšia záruka, výslovná ani predpokladaná.