

Kozmetický prístroj SMART 627II – Ultrazvuk a elektrokoagulátor



Poznámka: Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uchovávajte ho pre budúce použitie.

Obsah

Zhrnutie funkčného mechanizmu ultrazvukového kozmetického prístroja dva v jednom	1
Funkcie liečba a skrášlenie pomocou ultrazvukového kozmetického prístroja dva v jednom.....	1
Pokyny pre ovládací panel kozmetického prístroja dva v jednom.....	2
Návod na obsluhu pre ovládací panel kozmetického prístroja dva v jednom.....	3
Bezpečnostné opatrenia.....	4
Zákaz použitia.....	4
Technický index ultrazvukového kozmetického prístroja dva v jednom.....	5

Technický index kozmetického ultrazvukového prístroja dva v jednom

1. Frekvencia napájacieho napätia: 50Hz~60Hz;
2. Rozsah doby prevádzky: 1-30min;
3. Pre výstupný výkon existuje 10 úrovní zobrazovaného čísla, v ktorom sú štyri úrovne zelené, tri úrovne žlté a tri sú červené;
4. Výstupný výkon: 25W;
5. Frekvencia impulzov výstupnej modulácie 1MHz;
6. Vstupné napájacie napätie: 220V.

Body, ktorým je potrebné venovať pozornosť

1. Prevádzka prístroja

- 1) Panel (alebo dotknutá časť) sa musí pred použitím prístroja očistiť.
- 2) Použitý liečebný prostriedok má takú viskozitu, aby bola vhodná pre absorpciu pokožkou v spolupráci s pracovnou hlavou. Aby sa zabránilo spáleniu pracovnej hlavy, na pokožku sa použijú účinné liečebné prostriedky.
- 3) Čas prevádzky je normálne 15 minút, jeho predĺženie účinnok nezvyšuje.
- 4) Pre užívateľa, ktorý má malú plochu, ktorá sa má liečiť, musí byť použitá malá sonda a čas prevádzky sa zníži na 8-10 minút.
- 5) Uistite sa, že sa nadzvuková hlava nedostane blízko k oblasti očí a do kontaktu s očami.
- 6) Je striktné zakázané vykonávať iné úkony, počas vyžarovania energie nadzvukovou pracovnou hlavou, aby sa zabránilo spáleniu pracovnej hlavy z dôvodu prehriatia. Pracovný čas nesmie byť viac ako 15 minút.

2. Príprava pred odstránením škvvrny:

- 1) Pripojte hlavicu k prístroju.
- 2) Pred navlečením sterilných rukavíc si kozmetológ vyčistí a dezinfikuje ruky (môže si ich dezinfikovať alkoholom).
- 3) Upevnite ihlu na odstránenie škvvrny, ktorá bola dezinfikovaná na hlavicu.
- 4) Škvrmu, ktorú chce hosť odstrániť, dezinfikujte alkoholom.
- 5) Zákrok na odstránenie škvvrny sa môže vykonať po použití anestetického lieku na postihnutú časť hosta po dobu 3 minúty.

Zákaz použitia

1. Použitie je zakázané tehotným ženám.
2. Použitie je zakázané pacientom so srdcovými chorobami.
3. Použitie je zakázané pacientom s vysokým tlakom.
4. Použitie je zakázané pacientom s vnútornými zraneniami.
5. Použitie je zakázané pacientom s kožnými chorobami.
6. Použitie je zakázané pacientom, ktorých liečená časť má otvorenú ranu.

Zhrnutie funkčného mechanizmu

ultrazvukového kozmetického prístroja dva v jednom

1. Pre jeho široký rozsah liečby, rýchly účinok, ako aj vysoký pomer hojenia a jednoduchú prevádzku, prístroj priťahuje pozornosť verejnosti a je popularizovaný a dostáva sa do povedomia. Má tri hlavné aspekty funkcií:

(1) Mechanickú funkciu
Má mechanické funkcie, ako je zmäkčovanie tkaniva, zvýšenie penetrácie, zlepšenie metabolizmu, uľahčenie krvného obehu, povzbudzuje nervový systém a bunky.

(2) Ohrievaciu funkciu
Funkcia nadzvukové ohrievanie zasahuje krvný obeh, spomaľuje excitovaný bod bunky a pomáha zmierniť bolesť pomocou zmeny funkcie krvných ciev a metabolizmu. Tiež by mohla uvoľniť spasmodickú kožu a má funkciu spasmolysis.

(3) Chemickú funkciu
Nadzvuková vlna by mohla mať stimulujúci účinok a urýchliť metabolizmus. Tiež by mohla spôsobiť zmenu hodnoty pH na alkalický trend a pomáhať pri penetrácii liečiva, ako aj zlepšenie schopnosti sterilizácie liečiva.

Funkcia ultrazvuku:
2. V súčasnej dobe mikropočítačom riadené okamžité odstránenie miesta dotýkovým ovládaním je kozmetická technológia na najvyššej úrovni. S vysoko frekvenčným prúdom vyrábaným počítačovým systémom, je schopný okamžite odstrániť pehy, vekové škvvrny, ploché materské znamienko, vypuklú časť atď. bez krvácania a bolesti. Má medicínske skrášľovacie účinky, ako je rýchly účinok, bezpečný a žiadny vedľajší účinok. Charakteristiky sú nasledovne:

- (1) Zavádza najnovšie technológie a je plne počítačom ovládateľný, čo je bezpečné, pohodlné a rýchle.
- (2) Zavádza 10-úrovňový nastaviteľný výkon na odstránenie miesta, ktorý je flexibilný a spoľahlivý pri liečbe.
- (3) Unikátna 4HZ sínusová vlna s pulznou moduláciou poskytuje viacnásobné metódy liečby.

Funkcia liečba a skrášlenie nadzvukového prístroja dva v jednom

1. Kozmetický účinok prístroja

(1) Zmäkčuje trombus a odstraňuje červenú erupciu;

Opravuje zdeformované kapiláry pomocou nadzvukového impulzu spolu s masťou na aktiváciu krvného obehu. Červená erupcia je odstránená zodpovedajúcim spôsobom.

(2) Odstraňuje vyrážky alebo jazvy:

Keďže nadzvukovo môže preniknúť pokožkou, nielenže rozpúšťa zaschnutú krv kože, ale tiež zlepšuje krvný obeh a metabolizmus, čím sa rýchlo odstraňujú farebné škvvrny. Odporúča sa použiť nadzvukovú funkciu spolu s masťou na vyrážky, normálne 10-krát ako opakované ošetrenie a každé dva dni.

(3) Eliminuje abnormálny kožný pigment:

Použitie nadzvukovej funkcie spolu s trochou čínskeho tradičného medicínskeho krému na tvár, a spolu s vysokou dávkou vitamínu C môže mať pozitívny účinok na odstránenie pigmentu. Účinky prichádzajú po 3 zárokoch a úplná eliminácia po 10 až 40-tich zárokoch.

(4) Odstránenie pigmentu a hypodermických škvŕn:

Použitie nadzvukovej funkcie na poškodenie bunkovej membrány škvvrny a zabránenie vytvorenia tvaru, čím sa eliminuje pigment a dôkladne odstráni škvvrna spolu s funkciou metabolizmu. Podľa priebehu výpočtu liečby, 10-krát za obdobie liečby a dajte si prestávku na jeden týždeň pred ďalšou liečbou.

(5) Odstraňuje vrásky a krvné zrazeniny, ako aj zdvíha pokožku:

Použitím mechanizmu masážnej funkcie nadzvukovej funkcie, sa na jednej strane reguluje zmena membrány hypodermickej bunky, na druhej strane zlepšuje krvný obeh a metabolizmus. Taktó sa odstránia mierne vrásky, ako aj krvné zrazeniny alebo gelóza, ktoré boli poranené tvrdým predmetom.

(6) Odstraňuje očné vaky a tmavé kruhy:

Použitie mechanizmu masážnej funkcie nadzvukovej funkcie na urýchlenie krvnej a lymfatickej cirkulácie, spolu s funkciou ohrievania na rozpustenie tuku a zlepšenie hypodermickej absorpcie, a tým zníženie nadmernej vody a nahromadeného tuku a nakoniec eliminácia tmavých kruhov a očných vakov. Masirujte každý očný vak sondou jemne 5 minút v rovnakom smere textúry kože. Sondou sa priamo oči nedotýkajte.

(7) Zmäkčuje gelózu a odstraňuje akné:

Pomocou nadzvukovej funkcie spolu s masťou na akné masírujte postihnuté časti takmer jednu minútu, tým sa zabráni aby po gelóze vznikla jazva, zatiaľ čo akné sa vylieči.

(8) Lieči sklerózu a hadiu kožu:

Pomocou nadzvukovej funkcie spolu s glycerínom, tekutým fungidom alebo moderným lubrikantom na zlepšenie symptómov.


(9) Zlepšuje povrch pleti častým masírovaním :

Je schopný rýchlo odstrániť škvrny alebo akné a zlepšiť kortín kože pomocou nadzvukovej funkcie.

(10) Odstraňuje granuláciu

Otvorom ihly sa dostane mierne do kontaktu s koreňom granulácie a spáli koreňovú bunku laserovou elektrickou akupunktúrou. Granulácia sa stratí približne po jednom týždni.

Pokyny pre ovládací panel ultrazvukového kozmetického prístroja dva v jednom

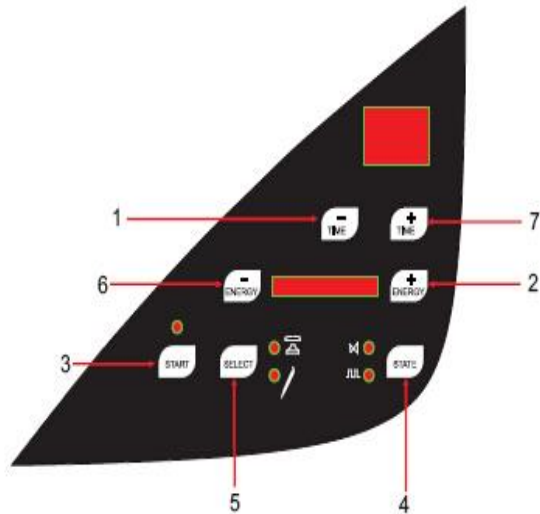

1. Čas mínus (TIME -)

7. Čas plus (TIME +)

6. Energia plus (ENERGY -)

2. Energia mínus(ENERGY +)



3.Štart /stop (START)

4. Vybrať režim tvaru vlny (STATE)

5. Vybrať funkčný režim(SELECT)

Návod na obsluhu pre ovládací panel ultrazvukového kozmetického prístroja dva v jednom

1. Postupy pre nadzvukovú funkciu

- 1) Vyčistíte pokožku tváre vhodným čistiacim prostriedkom na tvár;
- 2) Oparte tvár rozprašovacím zariadením na 10 minút po vyhladení čistiacim prostriedkom na tvár;
- 3) Dôkladne odstráňte uhry, akné atď.
- 4) Potľapkajte tvár vhodnou pleťovou vodou;
- 5) Jemne zotrite pleťovú vodu;
- 6) Vyberte správnu masť po analýze charakteru kože a problémov, ktoré sa majú vyriešiť;
- 7) Rovnomerne aplikujte vybranú masť na tvár;
- 8) Zapnite a vyberte správny výstupný konektor a pripojte ultrazvukovú sondu;
- 9) Stlačte tlačidlo START a nastavte veľkosť energie cez ENERGY;
- 10) Nastavte primeraný čas (TIMER), ktorý je normálne 15minút;
- 11) Vyberte ultrazvukový režim a tvar vln(STATE)—“Kontinuálna vlna () alebo “pulzná vlna () závisí od požiadavky;
- 12) Masírujte na pokožke, kde sa sondou aplikovala masť;
- 13) Po ukončení nadzvukovej operácie vyčistite sondu;
- 14) Pokožka bude osviežujúca a príjemná, ak bude použitá vhodná tradičná čínska medicína.

2. Postup pri odstraňovaní škvŕny

- 1) Pripojte zodpovedajúcu rukoväť na odstránenie škvŕny, zapnite a vyberte vhodnú ihlu;
- 2) Vyberte režim odstraňovania škvŕny prostredníctvom tlačidla SELECT;
- 3) Nastavte ENERGY na min;
- 4) Skontrolujte, či je tam elektrina odskúšaním kovovou časťou;
- 5) Určite rozsah prúdu v závislosti od veľkosti liečenej škvŕny host'a. Nastavte prúd zo slabého na silný a nastavte rozsah po komunikácii s host'om;
- 6) Prúd by mal byť primeraný. Príliš silný prúd bude viesť k pripáleniu a príliš slabý ovplyvní účinok a čas. Odstránenie škvŕny: pohybujte ihlou tam a späť s ihlou mierne sa dotýkajúc škvŕny. Ľahko zistíte, že melanín sa zmení na pripálený a zmizne po pohybe ihly. Je možné odstrániť ho na jedenkrát, ak je sediment škvŕny plytký s malou plochou; avšak, ak je sediment škvŕny hlboký a s väčšou plochou, je lepšie odstrániť dvakrát alebo trikrát. Okrem toho, host' zostáva stále nehybne, kozmetológ venuje pozornosť jej rukám v rovnováhe, aby sa netriasli, aby sa zabránilo popáleninám a nezrovnalosti spôsobenej počas prevádzky, ktorá môže viesť k zotaveniu rán a aby nevznikla jazva. Povrchové materské znamienko: Počas operácie je potrebné venovať osobitnú pozornosť rozlíšeniu hĺbky materského znamienka. Pre materské znamienka, ktoré rastú pod podkožným tkanivom v koreni, je lepšie nerezať kožnú vrstvu materského znamienka ihlou v jednom čase, ale spaľovať po malých krokoch. Po odstránení materských znamienok, ktoré rastú dosť hlboko, okrem vyhýbania sa zápalu, je najlepšie nanášať výživný krém na aktiváciu buniek po dobu 23 dní do vyliečenia rany, aby sa zabránilo výskytu jazvy na koži. Nie je však dovolené aplikovať výživný krém na zapálenú pokožku.

Odstránenie granulácie

Jemne sa dotknite koreňa granulácie končekom ihly a spál'te koreňovú bunku laserovou elektrickou akupunktúrou. Granulácia sa stratí približne po jednom týždni. Je tiež možné vypáliť granuláciu rádiovým akusektorom. V takomto prípade, veľkosť granulácie nesmie byť príliš veľká, ináč ju treba spáliť na niekoľkokrát, aby sa neovplyvnila liečba rany.

Odstránenie tetovania:

Normálne je vhodné použiť ihlu č. 3 na odstránenie tetovania ak je oblasť veľká. Metóda je približne rovnaká s metódou odstránenia škvryny. Jediný rozdiel je požadovaný čas a operácia je nepretržitá. Pre tetovanie príliš veľkej plochy (viac ako 3cm) musí byť tetovanie odstránené na niekoľkokrát a nie naraz. V opačnom prípade je následok nepredstaviteľný, ak sa zapáli bakteriálnou infekciou. Preto sú kozmetológ aj hosť opatrní. Ak vznikne silný zápal, liečba sa podá čo najskôr.