



Elektrické kozmetické kreslo

Selena

SVX-20365-06 (2270B)

iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovensko

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro

Vitajte pri používaní našich produktov.
Pred použitím produktov si pozorne prečítajte návod na použitie.
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zlepšovať dizajn a upravovať
produkty bez predchádzajúceho upozornenia.

1. O tejto príručke

Táto príručka by sa mala používať iba ako referencia na obsluhu tohto konkrétneho modelu. Ak sa táto príručka použije na iné účely, naša spoločnosť nenesie žiadne príslušné dôsledky a zodpovednosť.

Všetky informácie v tejto príručke sú chránené autorským právom a nesmú sa kopírovať a prekladať v žiadnej časti tejto špecifikácie bez písomného súhlasu našej spoločnosti.

2. Výstraha

- Pri výmene elektrických komponentov alebo údržbe a čistení prístrojov sa musí odpojiť napájanie.
- Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená, aby sa predišlo riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nestúpajte na toto zariadenie.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a neumiestnite ho na miesto, kde sa ho môžu deti dotýkať. Pri odchode nastavte opierku chrbta do najvyššej polohy.
- Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesta, ako je kúpeľňa, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inej poruche; Ovládače tiež držte mimo dosahu vody.
- Neumiestňujte a nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa maľuje/natiera alebo kde sa privádza kyslík.
- Osoby s fyzickými prekážkami, poruchami hmatu, duševnými poruchami, nedostatkom skúseností, zdravotným rozumom alebo deti nesmú zariadenie používať, pokiaľ nie sú sledované alebo inštruované personálom, ktorý môže byť zodpovedný za ich osobnú bezpečnosť.
- Ak je zástrčka poškodená, v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva kontaktujte distribútora, servisné stredisko alebo pracovníka s príslušnými zručnosťami a skúsenosťami.
- Počas manipulácie s výrobkom sa prosím uistite, že v mieste zdvihu nie je žiadna dostupná vec.
- Operáciu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Pôvodný návod
-  Len na použitie v interiéri


3. Bezpečnostné opatrenia

- Tento produkt by mala používať skúsená osoba, ktorá musí byť oboznámená s konštrukciou produktu, výkonom a návodom, a bude vykonávať pravidelnú údržbu.
- Pred inštaláciou, prevádzkou a nastavením si pozorne prečítajte tento návod a dobre si ho uchovajte.
- Tento výrobok sa nesmie používať na jednostranné alebo jednobodové zaťaženie.
- Dodržiavajte pravidlá bezpečnostnej prevádzky, produkt sa nesmie preťažovať a včas eliminuje nebezpečné faktory aby sa zabezpečilo, že bezpečnostné ochranné vybavenie produktu je úplné a spoľahlivé.
- Pravidelne utahujte skrutky a matice, aby ste predišli poruchám spôsobeným uvoľnením, posúvaním, vibráciami a odpadnutím.
- Počas údržby nesmie obsluha ľubovoľne rozoberať žiadne časti lôžka.
- Tento produkt nie je povolené prevádzkovať, keď je v poruche. Ak sa zistí abnormálny jav alebo abnormálny zvuk, musí sa okamžite zastaviť na kontrolu a po odstránení poruchy je možné pokračovať v práci.
- Obsluha musí byť oboznámená s preventívnymi opatreniami popísanými v každej časti návodu, aby bola zaistená bezpečnosť osôb a produktu.
- Tento produkt je vybavený trojžilovým napájacím káblom. Napájací kábel musí byť zapojený do trojtorovej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. Nie je to len preto, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, ale aj aby produkt mohol správne fungovať.
- Prevádzkujte výrobok prísne v súlade s výstražným štítkom, ktorý je na ňom vyrazený.
- Počas ovládania zdvíhania musí byť tlačidlo nepretržite stlačené, kým sa produkt nedostane do vhodnej polohy.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že nepretržitý pracovný čas by mal byť max. 2 min. ZAPNUTÉ; 18Min VYPNUTÉ, pri prevádzke motora.
- Údržbu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Po každom ošetroaní použite na odstránenie prachu z produktu iba neutrálny roztok.
- Pri nastavovaní každej časti držte ruky, nohy a hlavu mimo polohy označenej šípku.
(Ako je znázornené na fotografii)



4. Montáž

1. Výrobok umiestnite na vhodné miesto podľa celkového usporiadania, denného alebo umelého osvetlenia a prevádzkového stavu salónu alebo domácnosti u uchovávajte ho v čistom, suchom a chladnom prostredí.
2. Otvorte krabicu, aby ste skontrolovali, či je výrobok neporušený a či je príslušenstvo alebo náhradné diely kompletné. Ak sa vyskytne nejaký problém, kontaktujte distribútora alebo nás.
3. Inštalácia
Umiestnite výrobok do správnej polohy. Upozorňujeme, že na upevnenie postele nie je potrebné inštalovať na podlahu ďalšie skrutky, pretože pôvodný dizajn zohľadnil stabilitu. Uistite sa však, že je výrobok umiestnený na pevnom a rovnom podklade, aby sa predišlo akejkoľvek nehode. Ak sa výrobok otáča alebo nakláňa v dôsledku nerovného povrchu, nastavte štyri kusy plastových nožičiek (M10x30) a matíc (M10) šesťhranným vidlicovým kľúčom, ktoré sú upevnené na spodnom paneli, aby sa zabezpečilo, že výrobok bude stabilný.
4. Správne pripojte zástrčku produktu k zdroju napájania. (Ako je znázornené na fotografii)

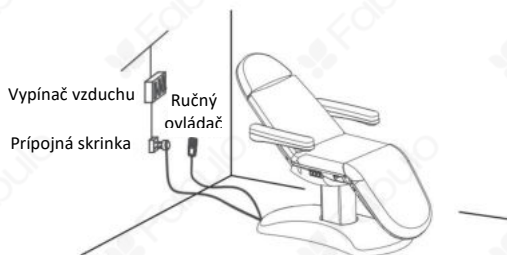

5. Konštrukcia produktu

- Tento produkt sa skladá z ovládacej skrinky, motora, drevenej časti, hardvéru, plastových častí a kože. Medzi nimi ovládacia skrinka riadi činnosť motorov a ručného ovládača.
- Tento produkt má nastavenie uhla operadla, nastavenie uhla sedadla a nastavenie zdvihu, čo je celková a integrálna konštrukcia. (Ako je znázornené na fotografii)




- ① nastavenie uhla operadla
- ② nastavenie zdvihu
- ③ nastavenie uhla sedadla
- ④ nastavenie uhla opierky nôh

6. Návod na použitie

Selena



Štandardná konfigurácia (kolískový spínač)

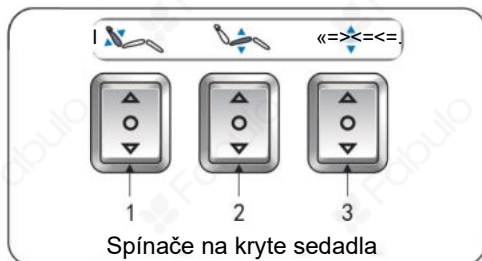

Č.	Popis	Operácia
1	Tlačidlo na nastavenie opierky chrbta	Stlačte tlačidlo hore (dole), operadlo sa posunie hore (dole), uhol sa zväčšuje (zmenšuje)
2	Tlačidlo na nastavenie sedadla	Stlačte tlačidlo hore (dole), sedadlo sa nakloní dozadu (späť do horizontálnej polohy).
3	Tlačidlo na ovládanie výšky	Stlačte tlačidlo hore (dole), operadlo sa posunie hore (dole), uhol sa zväčšuje (zmenšuje)
4	Tlačidlo na nastavenie opierky nôh	Stlačte tlačidlo hore (dole), opierka nôh sa posunie hore (dole), uhol sa zmenšuje (zväčšuje)

Selena

Voliteľná konfigurácia
(Ručný ovládač)

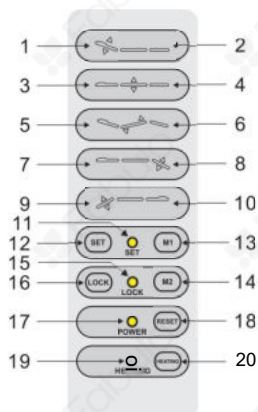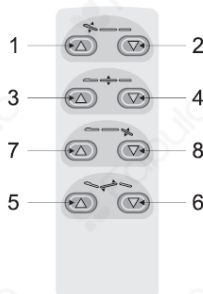



Č.	Popis	Prevádzka
1	Operadlo ide hore	Operadlo sa plynulo dvíha stlačením tlačidla.
2	Operadlo ide dole	Operadlo sa plynule spúšťa stlačením tlačidla.
3	Dvíha sa	Celá stolička/stôl sa plynule dvíha stlačením tlačidla.
4	Spúšťa sa	Celá stolička/stôl sa plynule spúšťa stlačením tlačidla.
5	Sedadlo sa nakláňa hore	Sedadlo sa plynule nakláňa stlačením tlačidla.
6	Sedadlo sa nakláňa dole	Sedadlo sa plynule vyrovná stlačením tlačidla.
7	Ľavá opierka nôh sa posúva hore	Uhol ľavej opierky nôh sa plynulo znižuje stlačením tlačidla.
8	Ľavá opierka nôh sa posúva dole	Uhol ľavej opierky nôh sa plynulo zvyšuje stlačením tlačidla.
9	—	—
10	—	—
11	Kontrolka nastavenia pamäte	Kontrolka sa rozsvieti po stlačení tlačidla na 2 sekundy a potom vstúpite do stavu nastavenia pamäte polohy.
12	Zadajte nastavenie pamäte polohy	
13	Nastavenie pamäte polohy 1	1. Stlačením tlačidla „SET“ na 2 sekundy, keď sa rozsvieti indikátor, nastavte stoličku/stôl na to, čo potrebujete naprogramovať. Stlačením tlačidla "M1"/"M2" dokončíte nastavenie funkcie pamäte. 2. Kontrolka zhasne, stlačte tlačidlo "M1"/"M2", výrobok sa automaticky presunie do zapamätanej polohy "M1"/"M2".
14	Nastavenie pamäte polohy 2	
15	—	—
16	—	—
17	Indikátor napájania	Ručný ovládač je správne pripojený k zdroju napájania, kontrolka svieti. V opačnom prípade by svetlo malo zhasnúť.
18	—	—
19	Kontrolka funkcie ohrevu	Stlačením tlačidla sa svetlo rozsvieti, funkcia ohrevu funguje; opätovným stlačením tlačidla svetlo zhasne, funkcia ohrevu prestane fungovať.
20	Tlačidlo ohrevu	

Poznámky:

1. Nastavenie pamäte polohy je dostupné len pre modely s pamäťovou funkciou.
2. Funkcia ohrevu je dostupná len pre modely s funkciou ohrevu.
3. Rôzne ručné ovládače by sa mali vybrať podľa rôznych konfigurácií.

7. Technické Parametre


Napájanie	AC 100-120V alebo AC 220-240V alebo AC 100-240V,50/60Hz
Menovitý výkon	300W
Teplota prostredia	0°C - + 40°C
Relatívna vlhkosť	30% - 90%
Menovité zaťaženie zdvíhania	175kg
Rozmery balenia	170x65x70cm

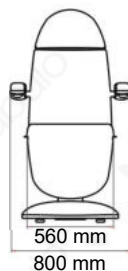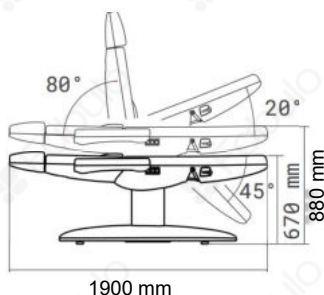

8. Údržba

- Po každom ošetrení použite iba neutrálny roztok na odstránenie prachu, škvrn na koži, kovových častiach alebo iných častiach. Dezinfekčné roztoky ako alkohol, kyseliny alebo alkalické roztoky sú zakázané. Je to preto, aby sa predišlo skráteniu životnosti komponentov.
- Pravidelne (raz ročne) namažte pohyblivé časti.

9. Schéma zapojenia obvodov systému

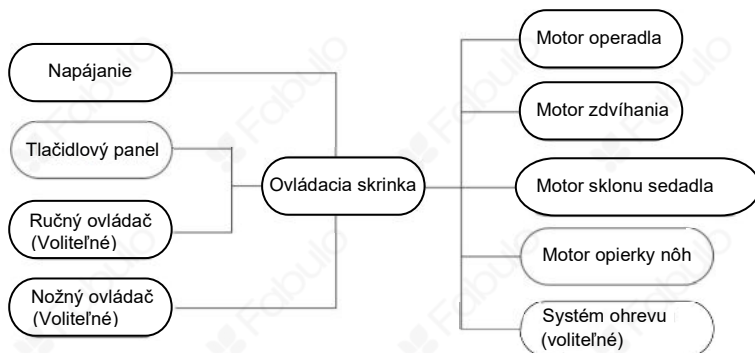

10. Riešenie problémov

Ako sa prejavuje porucha	Príčina	Riešenie
Motor nefunguje normálne	1. Napájací kábel je odpojený alebo nie je dobre zapojený.	Pripojte napájací kábel alebo ho dobre zapojte.
	2. Zlá kvalita ručného ovládača alebo nožného ovládača.	Vymeňte ručný ovládač alebo nožný ovládač.
	3. Nízka kvalita ovládacej skrinky.	Pre riešenie problémov sa obráťte na stredisko údržby alebo dodávateľa.
	4. Roztrhnutie zadnej časti motora.	
	5. Motor je poškodený.	
Chyba audio systému	1. Chyba pripojenia vstupu/výstupu.	1. Dvakrát skontrolujte pripojenie vstupu/výstupu.
	2. Chyba ovládacej skrinky zvuku.	1. Vymeňte chybné diely. 2. Ak problém stále nie je vyriešený, obráťte sa na servisné stredisko alebo dodávateľa ohľadom riešenia problému.
	3. Nízka kvalita reproduktora.	
Abnormálny zvuk	1. V rotujúcich častiach chýba mazací olej.	1. Pridajte mazací olej.
	2. V rotačných polohách (ako sú závesy, súpravy POM, plynový zdvih) je nedostatok mazacieho oleja.	2. Pridajte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motora.	3. Vymeňte motor.

Ak sa problém nevyrieši ani po vyššie uvedených úkonoch, obráťte sa na stredisko údržby alebo dodávateľa, aby ho vyriešili.



Nevyhadzujte staré alebo chybné zariadenia do domáceho odpadu; malo by sa to robiť len prostredníctvom verejných zberných miest.

▲ Pred použitím skontrolujte špecifikáciu produktu. Táto príručka slúži len ako referencia. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.