




Elektrický terapeutický stôl Fabulo Nexus

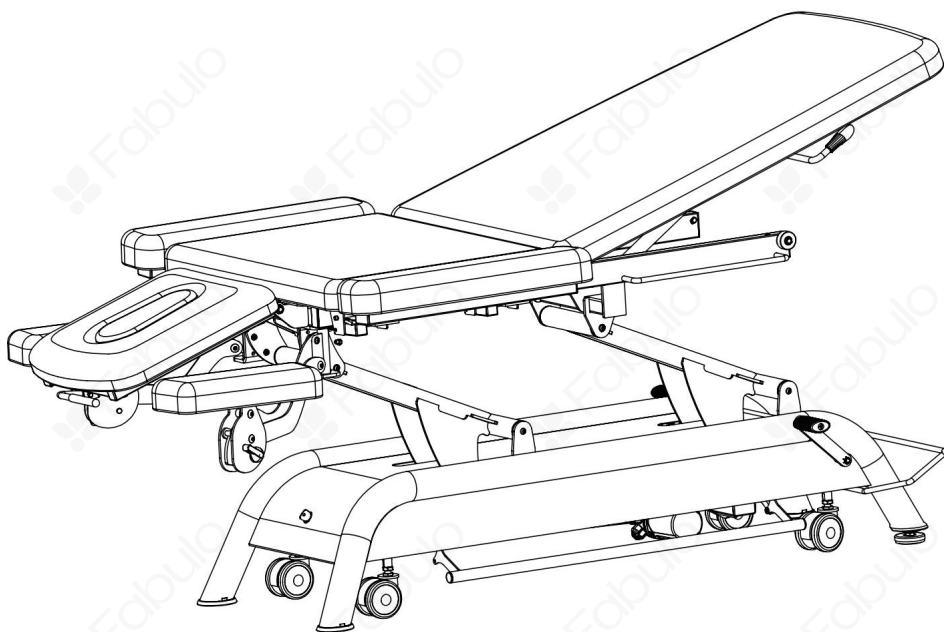




iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovakia

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro

Pred uvedením do prevádzky, si prosím, prečítajte tento návod.

Špecifikácia



Fabulo Nexus XB1

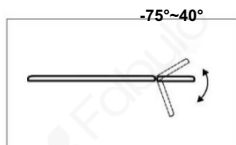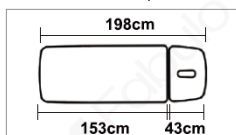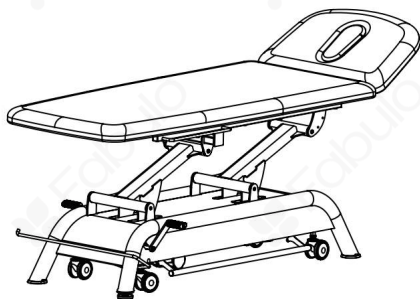

- Dĺžka: 78"/198cm
- Šírka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Pena: 2.5"/6.5cm Pevná pena s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavenie opierky hlavy: -75°~40°
- Pracovná kapacita: 440lbs/ 200kg

SK

Fabulo Nexus XC1


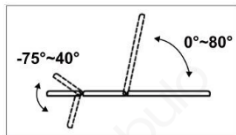
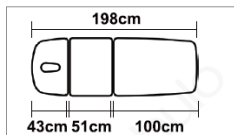


- Dĺžka: 78"/198cm
- Šírka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Pena: 2.5"/6.5cm Pevná pena s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavenie opierky hlavy: -75°~40°
- Pneumatické nastavenie operadla: 0-80°
- Pracovná kapacita: 440lbs/ 200kg

Špecifikácia



Fabulo Nexus XF3

SK

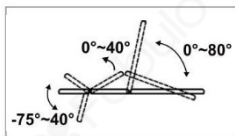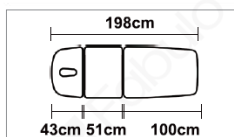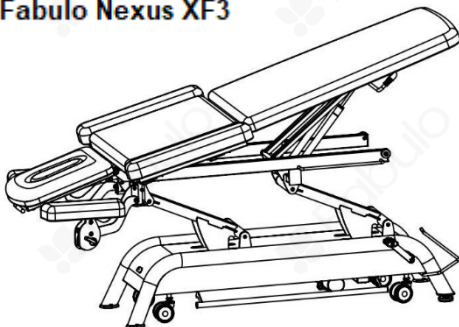

- Dĺžka: 78"/198cm
- Šírka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Pena: 2.5"/6.5cm Pevná pena s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavenie opierky hlavy: -75°~40°
- Pneumatické nastavenie operadla: 0-80°
- Elektrické nastavenie stredného zdvihu: 0-40°
- Pracovná kapacita: 440lbs/ 200kg




Fabulo Nexus XR1

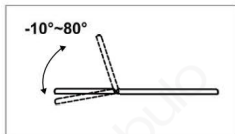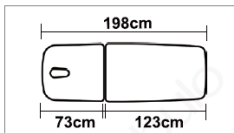

- Dĺžka: 78"/198cm
- Šírka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Pena: 2.5"/6.5cm Pevná pena s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavenie operadla: -10°-80°
- Pracovná kapacita: 440lbs/ 200kg

Špecifikácia

Fabulo Nexus XA1

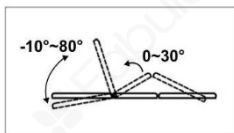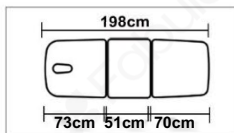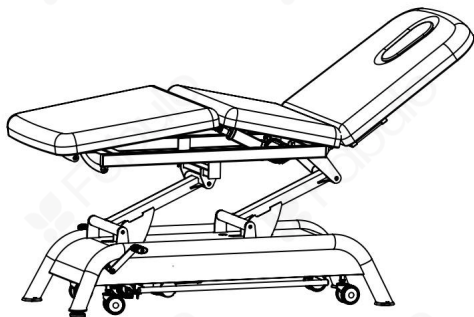

- Dĺžka: 78"/198cm
- Šírka: 27"/69cm, 29774cm
- Výška: 21"/53cm~37.5795cm
- Pena: 2.5"/6.5cm Pevná pena s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavenie operadla: -10°~80°
- Elektrické zdvíhanie v strede: 0-30°
- Pracovná kapacita: 440lbs/ 200kg


SK

Návod na použitie

SK

Napájanie


1. Vyberte stôl z obalu a umiestnite ho na rovný povrch
2. Zapojte zástrčku napájacieho kábla stola do zásuvky
3. Pred každým použitím otočte bezpečnostný zámok do polohy „ON“ (obr. 1), aby ste umožnili pripojenie k napájaniu.

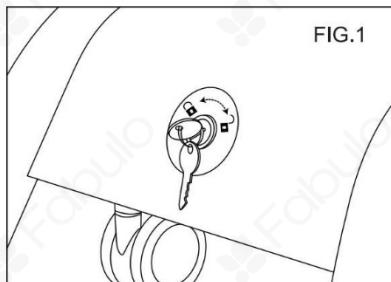


Pripomíname:

- Bezpečnostný zámok by mal inštalovať iba pôvodný výrobca a používatelia ho nesmú inštalovať súkromne.
- Po odchode určeného lekára alebo obsluhy odpojte napájanie a vyberte kľúč.

Ovládanie výšky

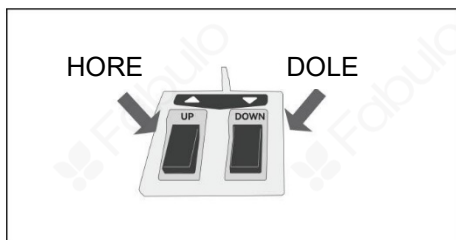

OBR.2

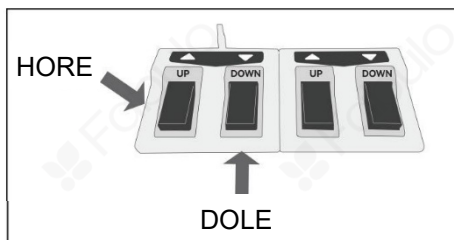


OBR.3


Ovládanie nožným pedálom

Pomocou nožného ovládača zvýšite alebo znížite výšku stola, ako je znázornené na obr. 2 alebo obr. 3.

Ovládanie výšky

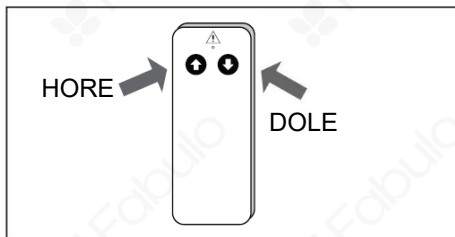

OBR.4

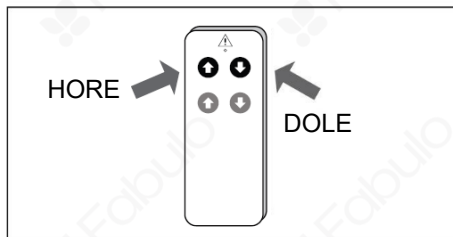


OBR.5

SK

Ručné ovládanie

Pomocou ručného ovládača zvýšte alebo znížte výšku stola, ako je znázornené na obr. 4 alebo obr. 5.

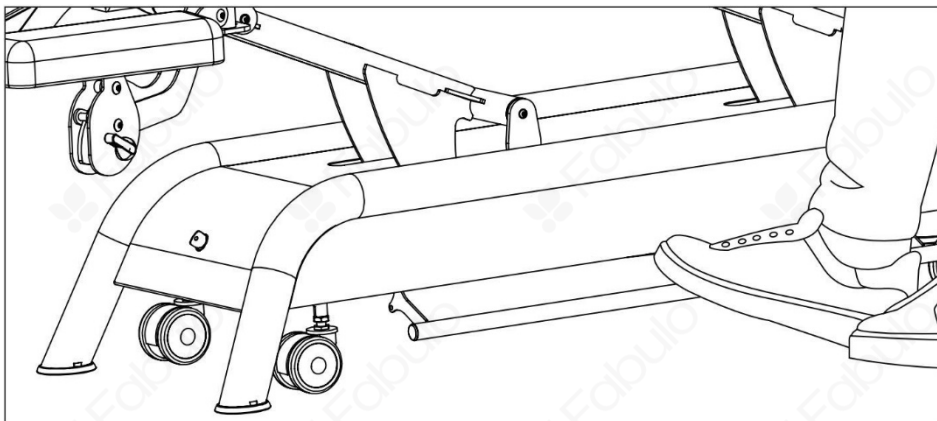

OBR.6


Ovládanie nohou

Systém Ovládania nohou je možné použiť na ovládanie a nastavenie výšky stola. Stlačením priečky nadol sa zvýši výška stola a zdvihnutím priečky nahor sa zníži výška postele (obr. 6).


Nastavenie uhla strednej časti stola

(K dispozícii pre model Fabulo Nexus XA1, Fabulo Nexus XF3)

SK

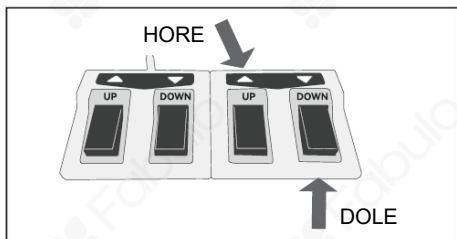

OBR.7

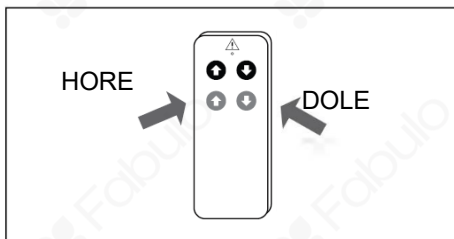


OBR.8

Ovládanie nožným pedálom

Pomocou nožného ovládača nastavte uhol stredného zdvihu, ako je znázornené na obr. 7

Ručné ovládanie

Pomocou ručného ovládača nastavte uhol stredného zdvihu, ako je znázornené na obr. 8

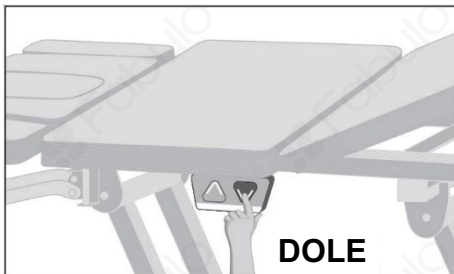


Ovládanie na bočnom paneli

Ovládanie na bočnom paneli je možné použiť na nastavenie uhla strednej časti. Stlačením tlačidla „Hore“ zvýšite uhol stola a stlačením tlačidla „Dole“ ho znížite. Uvoľnite tlačidlo, keď je povrch stola v požadovanom uhle.


Návod na použitie

Nastavenie prednej lakťovej opierky

Zdvihnite lakťovú opierku do požadovanej výšky (obr. 9) a potom ju spustíte otočením spúšte na boku konzoly smerom nahor. (OBR 10)

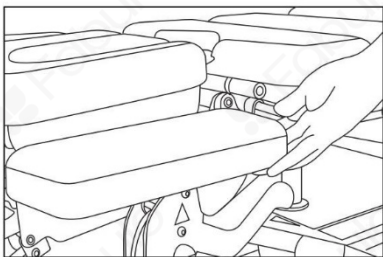

OBR.9

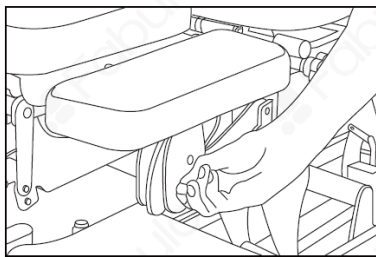

OBR.10

SK

Zdvihnite prednú lakťovú opierku nahor a otočte ju, aby ste nastavili jej polohu tak, ako je znázornené na obrázku 11.


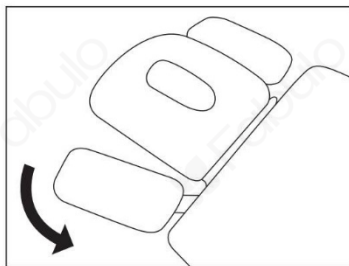


FIG.11

Nastavenie otočnej predĺženej bočnej lakťovej opierky

Uchopte bočnú lakťovú opierku a posuňte ju nabok, aby ste ju spustili nižšie.

Uchopte bočnú lakťovú opierku, zdvihnite ju na kovovú plošinu a položte ju na ňu. (OBR. 12)

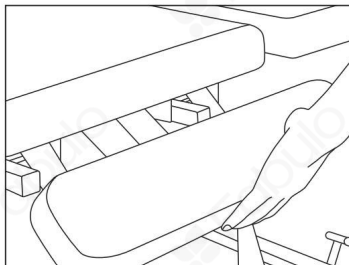

OBR.12

Návod na použitie

SK

Nastavenie uhla opierky hlavy

Uchopte rukoväť pod časťou opierky hlavy, zdvihnite alebo spustíte ju do požadovaného uhla a potom ju uvoľnite.

(OBR.13)



FIG.13

Nastavenie uhla opierky nôh

Jednou rukou potiahnite nahor ktorúkoľvek páku pod časťou stola s opierkou na nohy, zatiaľ čo druhou rukou držte vrch stola. Zdvihnite alebo spustíte ho do požadovaného uhla a potom ho uvoľnite. (OBR. 14)


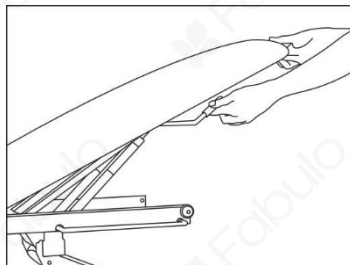


FIG.14

Otočné kovové zábradlie (voliteľné príslušenstvo)

Spustíte zábradlie: Vytiahnite kolík na prednom konci kovového zábradlia a sklopte ho nadol, kým nebude kolmo na povrch postele. Zasuňte kolík späť, aby ste zaistili kovové zábradlie. (Obrázok 15)

Inštalácia zábradlia: Vytiahnite kolík na prednom konci kovového zábradlia, otočte zábradlie nahor, kým nebude kolmé na povrch postele, a kolík zasuňte späť na uzamknutie kovového zábradlia. (Obrázok 15)

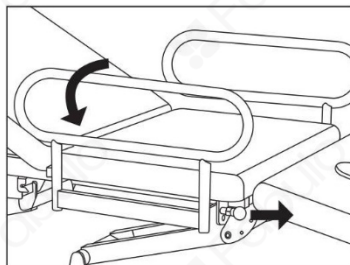

OBR.15

System pohotovostných koliesok

Pohyb stola

Nohou zatlačte tyč nadol, aby ste uvoľnili štyri kolieska, a potom presuňte stôl na rovný povrch. (OBR.16)

Počas prevádzky buďte opatrní s nohami.

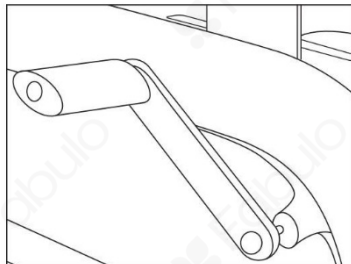


FIG.16

SK

Záruka

Rám stola	Pohon	Príslušenstvo	Čalúnenie	Pneumatické čerpadlo
5-ročná záruka	3-ročná záruka	2-ročná záruka	2-ročná záruka	1-ročná záruka

- Všetky záruky sú obmedzené na náhradné diely z výroby, opravu z výroby alebo výmenu, ak nebol produkt vrátený na vaše náklady.
- Tieto záruky predstavujú celú poskytovanú záruku. Neexistujú žiadne ďalšie záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné.
- Záruka sa vzťahuje len na mechanické poruchy, ku ktorým dochádza počas bežného používania. Akékoľvek umelé poškodenie, neoprávnená úprava, nesprávna preprava, nesprávne použitie, zneužitie alebo použitie nad rámec rozsahu tejto príručky už nie je chránené zárukou.

Bezpečnostné pokyny

Tento elektrický terapeutický stôl série Fabulo Nexus spĺňa bezpečnostné predpisy. Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie ľudského tela, predmetov a produktu. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod.

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnej prevádzke a správnom používaní, ktoré majú chrániť ľudské telo pred zranením a predchádzať poškodeniu výrobku. Ak sa počas používania vyskytnú nasledujúce podmienky, výrobca nepreberá záruku ani neručí za zranenie osôb, poškodenie majetku, poškodenie produktov a iných predmetov.

Bezpečnostné pokyny

- Používateľ má menej ako 18 rokov
- Použitie nad rámec funkčnosti produktu
- Pacient má fyzické alebo zmyslové postihnutie alebo nízku inteligenciu a chýbajú mu skúsenosti alebo relevantné znalosti.
- Nesprávne použitie
- Zdvíhanie predmetov, ktoré presahujú nosnosť výrobku
- Premiestňovanie a preprava s použitím chybných alebo neúčinných ochranných zariadení
- Neoprávnené zmeny v konštrukcii zariadenia
- Pokračovanie v používaní produktu aj po zistení štrukturálneho poškodenia
- Nesprávna údržba
- Vonkajšie katastrofy a vyššia moc
- Vystavenie zariadenia extrémnemu chladu, teplu, slnku a vlhkosti

Elektrické nebezpečenstvo

- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho vymeňte, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte zariadenie na mokrých podlahách alebo vo vlhkom prostredí. Teplota okolia by sa mala udržiavať medzi 10 °C a 30 °C
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde sa nachádzajú horľavé alebo výbušné plyny alebo pary.

Riziko nehôd

- Za žiadnych okolností neumiestňujte do konštrukcie žiadne predmety ani časti tela, aby ste predišli poškodeniu predmetov alebo zraneniam, keď sa zariadenie neočakávane zdvihne alebo zrúti.
- Nestojte na zariadení, aby ste predišli pádu alebo prevráteniu.

Starostlivosť o kožu

- Aby ste predišli praskaniu koženého poťahu matraca, vyhýbajte sa vlhkému prostrediu, vode na povrchu postele a chladnému alebo prehriatému prostrediu.
- Utrite dočista neutrálnym čistiacim prostriedkom; dôkladne utrite a osušte.
- Zabráňte kontaktu ostrých alebo tvrdých predmetov s koženým povrchom.