

YAKIMASPORT

COLD BANDAGE

Inštrukcia pre používateľa

1. Otvorte obal a vyberte mokrý obväz.
2. Obviažte obväz okolo postihnutého miesta tak, aby dôkladne priliehal a zároveň tak, aby na postihnuté miesto nevyvíjal prílišný tlak. Neobväzujte obväz príliš mnohými vrstvami za účelom zabezpečenia odparovania sa chladiacej substancie.
3. Zabezpečte koniec obväzu tak, aby sa nerozvážoval.
4. Postihnuté miesto sa schladí v priebehu 10 – 15 minút a zostane schladené do 2 hodín.
5. Odporúčame kontrolu chladenej časti tela každých 15 minút. Ak dôjde k začervneniu alebo inej reakcii spôsobenej nadmerným ochladením postihnutého miesta, prerušte chladenie.

Zloženie: Polyamid, Polyester, Latexová guma, Voda, Etanol, Mäta, Borneol

Pozor:

1. Produkt určený výlučne na vonkajšie použitie.
2. Ak sa obsah dostane do oka, nevytierajte ho, vymyte obsah z oka tečúcou vodou a prípade potreby vyhľadajte pomoc lekára.
3. Skladujte mimo dosahu detí.
4. Nepoužívajte produkt po prekročení dátumu záruky uvedenom na obale.
5. Produkt obsahuje latex. Produkt nesmú používať osoby alergické na latex.

Skladujte pri teplote nižšej než 25°C.

Distribútor:

iM3,s.r.o., Malotejedská 515/8, Dunajská Streda, www.fabulo.sk